


Therapeutix 4D SW

Массажное кресло

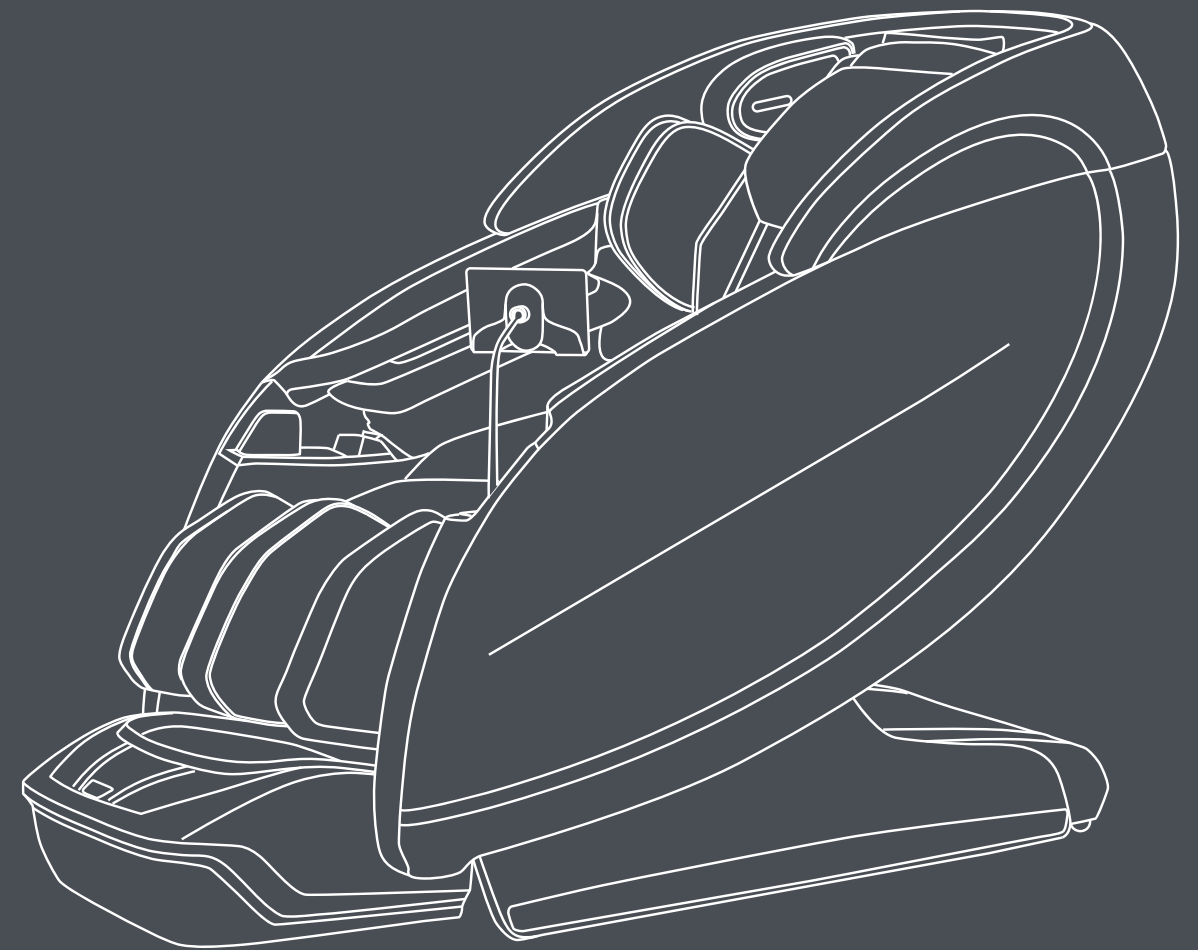

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Therapeutix 4D SW!

Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться массажным креслом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

Меры предосторожности	2
Наименования деталей	5
Инструкция по сборке и установке	7
Перед использованием	9
Инструкция по эксплуатации	10
После использования	21
Обслуживание и уход	22
Устранение неполадок	23
Технические характеристики	24

Меры предосторожности

Прежде чем использовать (это кресло), прочитайте инструкцию.

Предупреждение — для снижения риска ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

- Вилка должна быть полностью вставлена в соответствующую розетку. Неправильное подключение заземляющего провода может привести к риску поражения электрическим током.
 - Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию, если у вас есть сомнения в правильности заземления устройства.
 - Не заменяйте вилку, поставляемую с прибором, если розетка не подходит. Убедитесь, что правильная розетка установлена квалифицированным электриком.
 - При использовании массажного кресла следует всегда соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск поражения электрическим током, ожогов, пожара или травм.
- 
 - Для снижения риска поражения электрическим током всегда отключайте этот прибор от электросети сразу после использования и перед очисткой.
 - Пожалуйста, убедитесь, что массажное кресло подключено к подходящей электросети.
 - Для снижения риска короткого замыкания и пожара убедитесь, что вилка плотно вставлена в подходящую розетку.
 - Всегда отключайте массажное кресло от электросети сразу после использования и перед уборкой.
 - Не используйте массажное кресло в местах с высокой влажностью.
 - Не используйте его на улице и избегайте размещения под прямыми солнечными лучами.
 - Если отключится электропитание во время использования, обязательно переводите выключатель питания в положение «выключено» и выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить повреждения при восстановлении питания.
 - Никогда не используйте массажное кресло, если шнур питания влажный или поврежден.
 - Никогда не подключайте или отключайте шнур питания с влажными руками.
 - Требуется контроль, если прибор используется детьми, инвалидами или лицами с ограниченными возможностями.
 - Используйте прибор только по назначению, как описано в руководстве по эксплуатации.



- Не используйте детали, не произведённые на заводе.
- Не стойте, не садитесь и не прыгайте в область для икроножных мышц во время работы массажного кресла, чтобы избежать травм.
- Не пытайтесь встать на спинку или подлокотники кресла — это может вызвать травму.
- Будьте осторожны, не стоит засыпать во время сеанса массажа.
- Всегда содержите массажное кресло в чистоте и никогда не вставляйте предметы в зазоры в и вокруг кресла.
- Не перемещайте кресло, держа за шнур питания.
- Перед использованием всегда проверяйте, не порвана ли поверхность массажного кресла. Если обнаружен прорыв на любом участке ткани спинки, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
- Данный прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
- Чтобы снизить риск недомогания или травмы, проконсультируйтесь с врачом, если у вас:
 - Злокачественная опухоль
 - Сердечные заболевания
 - Беременность или послеродовой период
 - Менструация
 - Остеопороз

А также если вы страдаете болями в спине, проходите курс лечения или вам требуется полный покой.

- Если вы испытываете боль во время использования, немедленно прекратите пользоваться массажным креслом, при возникновении каких-либо травм немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Никогда не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.
- Данное изделие не является медицинским прибором и предназначено только для проведения комфортного массажа. Не используйте данное изделие в качестве замены медицинского лечения.



- Продолжительность каждого сеанса массажа не должна превышать 30 минут. Чрезмерное массажирование может привести к перегреву, что сократит срок службы прибора.
- Не используйте массажное кресло там, где используются аэрозольные средства или подается кислород.
- Массажное кресло не предназначено для детей в возрасте до 14 лет.

Примечание

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, сервисный агент или другой квалифицированный специалист.
- Во время работы прибор нагревается. Лицам, чувствительным к высокой температуре, следует соблюдать особую осторожность при использовании прибора.

Наименования деталей

Схема кресла

- 1. Верхняя панель
- 2. Подушка-подголовник
- 3. Стереосистема
- 4. Подушка для спины
- 5. Планшет управления
- 6. Боковая панель
- 7. Беспроводная зарядка
- 8. Подушка сиденья
- 9. Блок массажа икр
- 10. Ножной блок
- 11. Колеса для перемещения


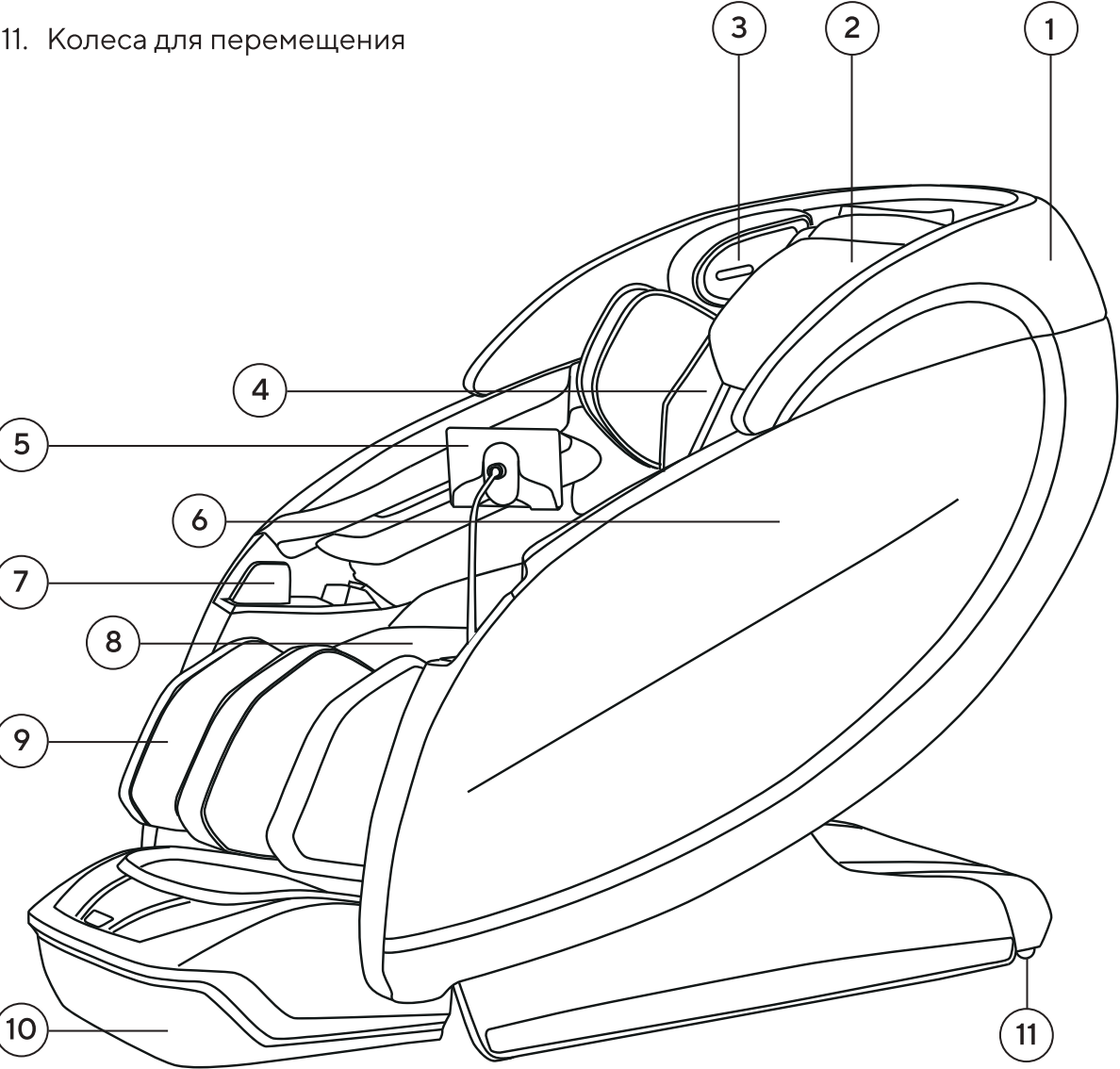


Схема кресла


- 1. Разъем питания
- 2. Предохранитель
- 3. Переключатель Вкл/Выкл

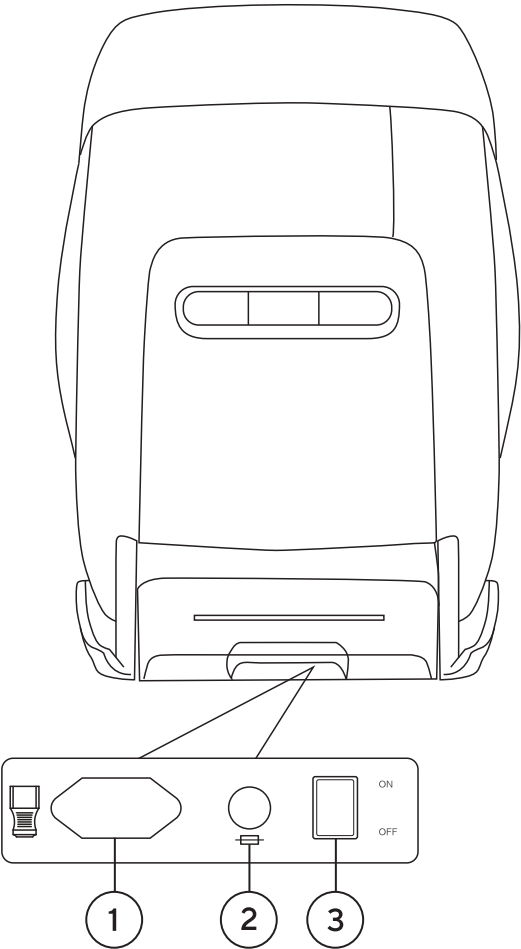

Инструкция по сборке и установке

Шаг 1. Установка секции подножки

- Сначала подключите трубку подножки к разъему на массажном кресле.
- Поднимите подножку и вставьте круглое отверстие в правом верхнем углу подножки на металлический штифт массажного кресла, затем зафиксируйте его пряжкой.
- При установке левой стороны сначала переместите всю подножку вправо, совместите круглое отверстие в верхнем левом углу и штифт массажного кресла, переместите нижнюю подножку влево, затем вставьте пряжку для фиксации.
- Потяните чехол на подножке к молнии массажного кресла.
- Застегните кожаный чехол.

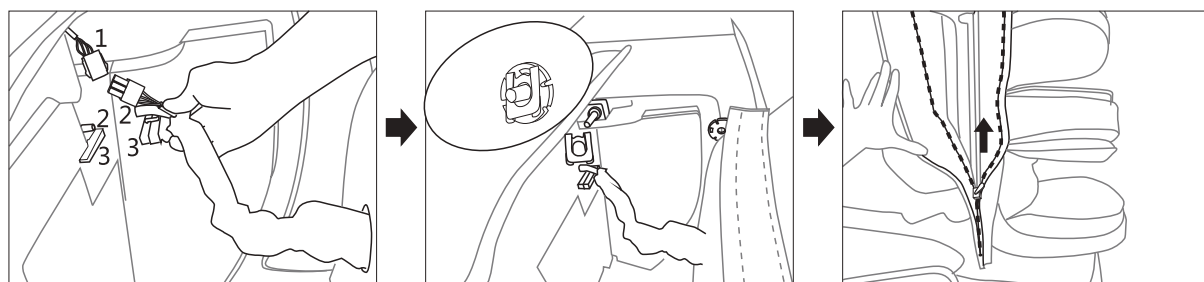

Шаг 2. Установка пульта дистанционного управления.

- Вставьте кронштейн (a) в крепежную гайку (b), затем вставьте в посадочное место держателя планшета (c) и закрутите её (Рис. 1).
- Вставьте кронштейн в паз слота массажного кресла (Рис. 2).
- Наконец, соедините провод от планшета с ответным проводом массажного кресла (Рис. 3).

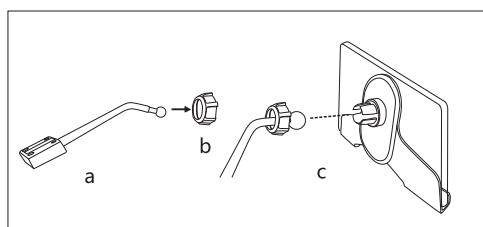


Рис. 1

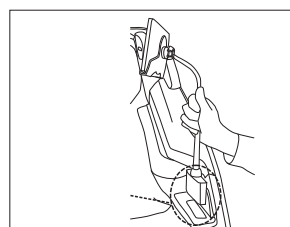


Рис. 2


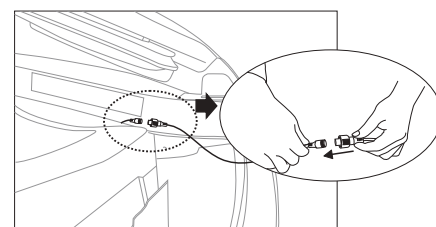


Рис. 3

Инструкция по сборке и установке

Перемещение массажного кресла


- В нижней части кресла есть движущиеся ролики.
- Поднимите спинку кресла в вертикальное положение.
- Выключите кресло.
- Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке, переместите кресло в нужное место при помощи роликов.

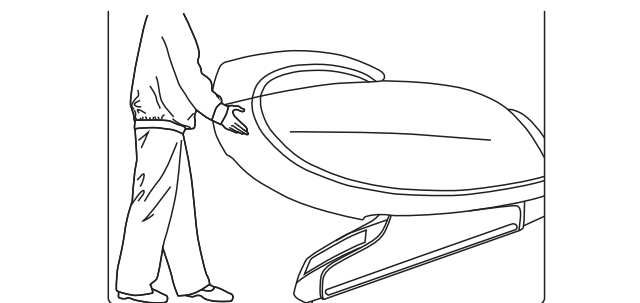

- Не перемещайте кресло, когда в нем сидят люди.
- Не используйте подлокотники для перемещения кресла, держитесь за держатель перемещения сзади и спереди (для комфортного перемещения рекомендуется как минимум 4 человека).


Размещение кресла

- Разместите массажное кресло в открытой зоне.
- Обеспечьте достаточное пространство вокруг кресла для его наклона: 15 см сзади и 50 см перед подножкой.
- Не пережимайте креслом кабель питания.

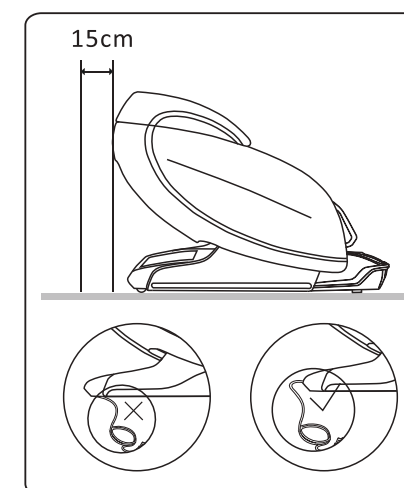


- Чтобы избежать повреждения пола и снизить шум, положите под массажное кресло коврик.
- Убедитесь, что спереди и сзади массажного кресла нет препятствий.
- Пожалуйста, не устанавливайте кресло на влажном или неровном полу.
- Чтобы избежать помех сигналу, разместите его в полутора метрах от AV/TV и радиоприемника.


Перед использованием

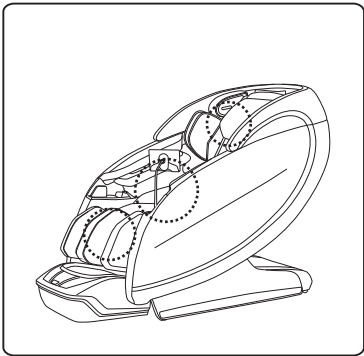


1. Убедитесь, что продукт в хорошем состоянии
- Убедитесь, что подголовник и подушки спинки и сиденья не повреждены.
 - Убедитесь, что шнур питания не поврежден.
 - Убедитесь, что подставка для ног размещена правильно (если она находится ниже горизонтальной поверхности, когда вы садитесь в массажное кресло, то при приложении силы кресло может повредиться).

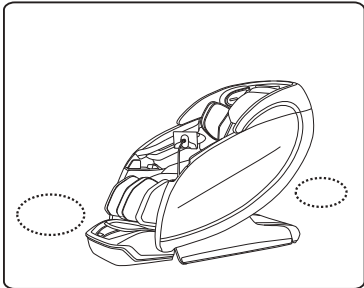

2. Проверьте пространство около кресла
- Убедитесь, что вокруг массажного кресла нет препятствий.

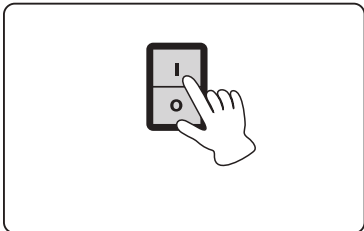

3. Подключите шнур питания массажного кресла
- Подсоедините шнур питания.
 - Нажмите выключатель питания на задней панели массажного кресла.

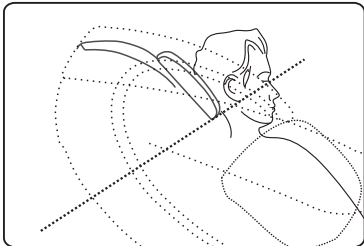

4. Настройте положения подголовника
- Отрегулируйте нижнюю часть положения подголовника и выровняйте положение в одной горизонтальной плоскости.

Инструкция

Панель быстрого доступа (на правом подлокотнике)



Инструкция

Пульт управления



1. Интерфейс и описание пульта управления

Включите пульт дистанционного управления, после загрузки будет отображено главное меню. Пожалуйста, выберите нужную программу.



1. Избранные режимы
2. Возврат
3. Функция Sonic Wave
4. Автоматический режим
5. Ручной режим
6. Настройка положения кресла
7. Настройки
8. Пауза

2. Функция Sonic Wave

На выбор представлены 5 режимов Sonic-терапии (воздействие звуковых волн):




1. Проработка верхней части тела
2. Проработка позвоночника
3. Режим проработки всего тела
4. Проработка нижней части тела
5. Интенсивная проработка
6. Сканирование тела

5 режимов синхронизации с музыкой №1:



1. Энергетический заряд
2. Снятие стресса
3. Омоложение
4. Поющая чаша
5. Сладкие сны

5 режимов синхронизации с музыкой №2:

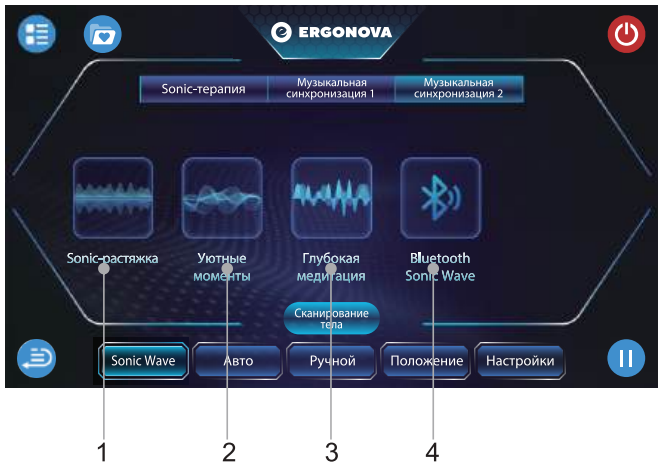

1. Sonic-растяжка
2. Уютные моменты
3. Глубокая медитация
4. Bluetooth Sonic Wave

3. Автопрограммы

Представлены 5 режимов для разных целевых аудиторий:




1. Красота и здоровье
2. Водители
3. Домашний комфорт
4. Офисные работники
5. Пользователи смартфонов

Представлены 5 режимов тематических массажей:




1. Тайский массаж (растяжка)
2. Китайский Туйна массаж
3. Японский Шиatsu массаж
4. Шведский расслабляющий
5. Бали спа-массаж

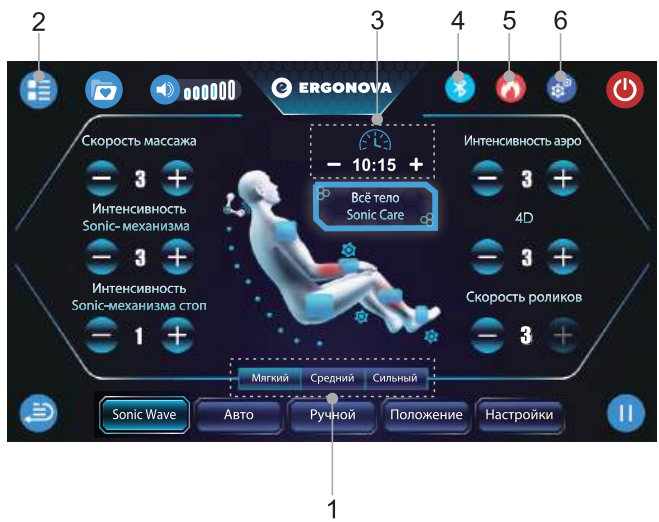

1. Выбор интенсивности массажа: мягкая, средняя, сильная
2. Вернуться в главное меню
3. Время массажа
4. Bluetooth
5. Режим нагрева
6. Переключатель роликов

4. Определение положения плеча

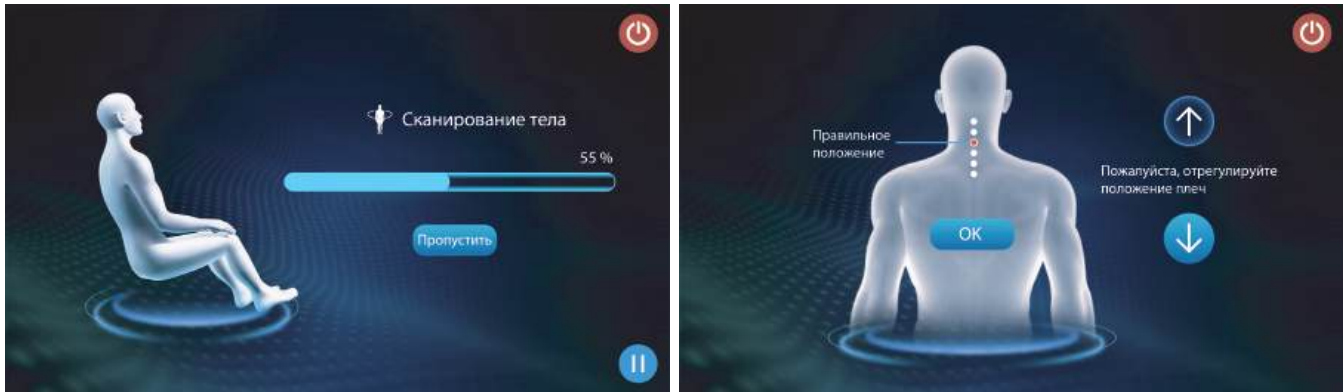

1. При выборе любой автоматической программы массажа функция сканирования тела будет автоматически активирована.
 2. В течение 10 секунд после завершения сканирования пользователи могут точно настроить положение плеча на основе результатов обнаружения. Нажмите кнопку "ОК" для подтверждения текущего положения плеча.
- * Во время сканирования тела нажатие кнопки "Пропустить" немедленно пропустит обнаружение положения плеча.

5. Ручной режим



На выбор представлены 10 техник массажа:

разминающий массаж (2 уровня регулировки), постукивающий массаж (2 уровня регулировки), разминание и постукивание, круговой массаж, полукруговой массаж, массаж Шиацу, массаж Туйна, похлопывающий массаж.



1. Регулировка скорости массажа
2. Интенсивность Sonic-механизма
3. Регулировка интенсивности 4D
4. Интенсивность Sonic-механизма стоп


6. Регулировка посадки



1. Регулировка наклона спинки кресла
2. Настройка расширения и подъема ног
3. Настройка (3 положения) режима нулевой гравитации (Zero-G)



1. Настройки области массажа: точка, регион, все тело
2. Регулировка зоны воздействия массажа: выше или ниже
3. Настройки области массажа по ширине

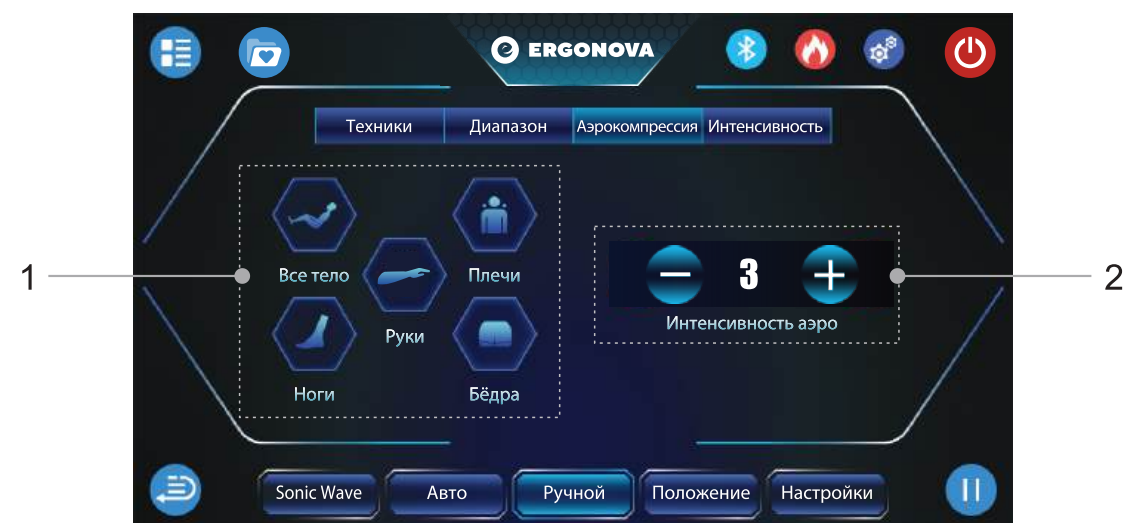

1. Выбор зоны аэромассажа воздушными подушками
2. Корректировка воздушного давления

7. Дополнительные функции



1. Выбор зоны нагрева
2. Выбор зоны роликового массажа



1. Регулировка громкости динамиков
2. Регулировка громкости кнопок
3. Регулировка яркости экрана
4. Регулировка подсветки кресла
5. Сброс настроек до заводских




Выбор языка

8. Предупреждение



Когда на экране появляется это предупреждение, массажное кресло автоматически останавливается. Проверьте, нет ли посторонних предметов под спинкой кресла, между голенью и стопой. После удаления предмета нажмите на иконку  чтобы выключить кресло под безопасным углом; или нажмите иконку  для перезапуска детекции. Массажное кресло возобновит работу, если посторонних предметов не будет обнаружено.

9. Избранное

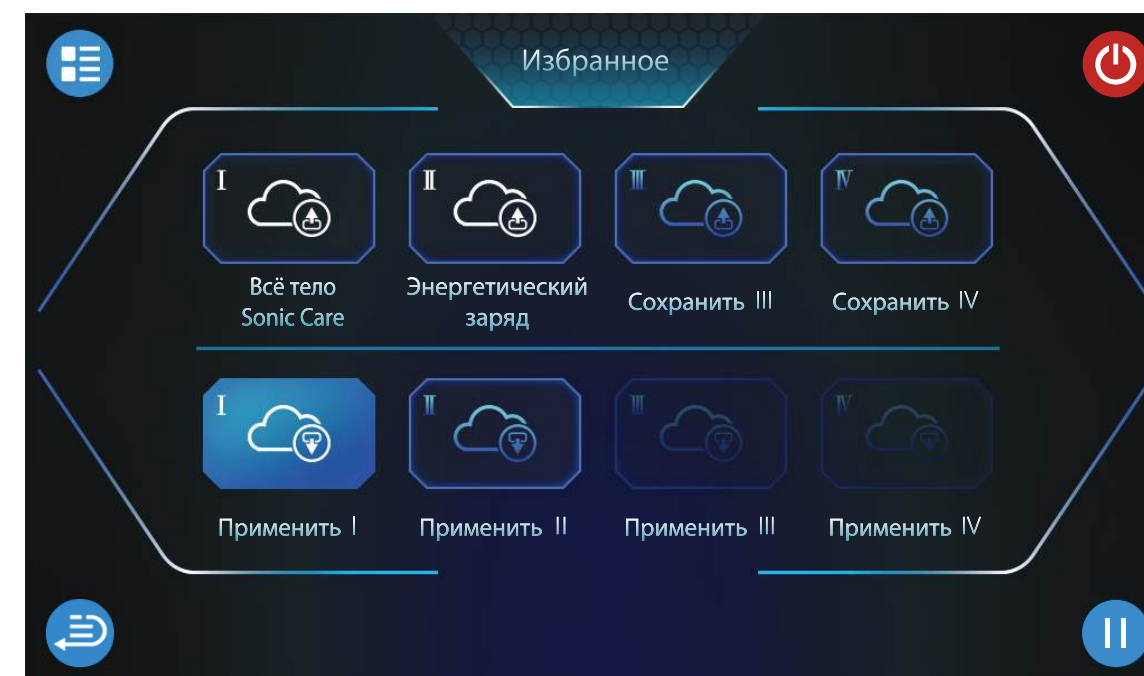

Функция запоминания:

Пока запущена автоматическая программа, нажмите на иконку  чтобы войти в «Избранное». Нажмите кнопку Save на верхней строке, чтобы сохранить текущую запущенную программу, включая технику массажа, интенсивность давления воздушных подушек, интенсивность механизма 4D, механизма Sonic Wave, состояние нагрева, статус роликов и их скорость. Вы можете сохранить до 4 избранных программ.

Запуск сохраненной программы:



Перейдите на страницу «Избранное». Выберите нужную сохраненную программу, затем нажмите «Применить» под названием программы для запуска.

Как воспроизводить музыку по Bluetooth стереосистеме массажного кресла?

Для подключения к воспроизведению музыки по Bluetooth:

1. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне или iPad.
2. Найдите доступные устройства и выберите «ERGONOVA» для прямого сопряжения.
3. После сопряжения вы можете воспроизводить музыку с вашего устройства или любого музыкального приложения.

После использования

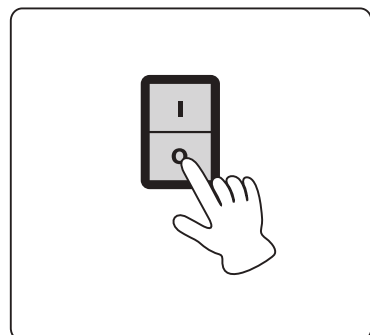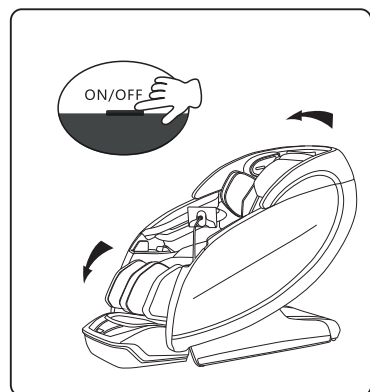

1. После завершения программы массажа, пожалуйста, нажмите кнопку выключения, массажное кресло автоматически восстановит положение.

* Перед регулировкой угла наклона спинки осмотрите прилегающую территорию, обратите особое внимание на детей или домашних животных, которые могут находиться в непосредственной близости.

* Убедитесь, что ваши руки и ноги находятся на достаточном расстоянии от зазоров между подлокотниками, опорой для ног и подставкой для ступней, чтобы избежать возможных защемлений или травм.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить массажное кресло, и положите пульт

дистанционного управления в ящик для хранения.



3. Выключите главный выключатель питания.

4. Выньте вилку из розетки.

* Не тяните за шнур питания, чтобы вынуть вилку.

* Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.

Обслуживание и уход

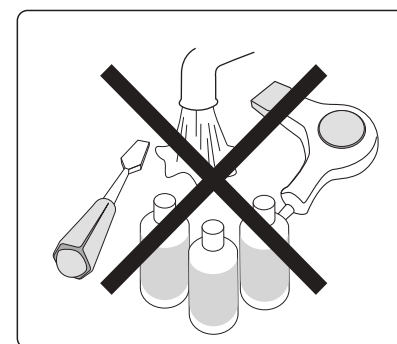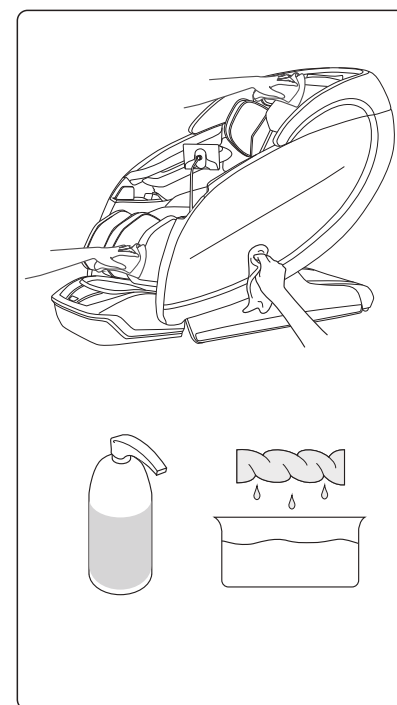

- Выключайте питание перед чисткой.
- Не лейте воду непосредственно на кресло. Распылите или увлажните чистящую ткань.
- Используйте нетоксичное средство и сухую ткань для чистки кресла.
- Убедитесь, что кресло полностью высохло, прежде чем подключать сетевой кабель к розетке.
- Не используйте сушильный аппарат для сушки очищенных участков. Во избежание повреждения кресла, рекомендуется естественная сушка.
- Не используйте чистящие средства, содержащие бензол или спирт.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Кресло подключено к питанию, но не работает	1. Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку и работает ли она должным образом. 2. Проверьте, находится ли главный выключатель питания в положении "I".
Пульт дистанционного управления реагирует, но массажное кресло не работает	Возможно, массажное кресло автоматически отключилось из-за устройств защиты от перегрева. Пожалуйста, выключите питание и дайте креслу остыть в течение 30-50 минут.
Ни пульт дистанционного управления, ни массажное кресло не включаются	Массажное кресло автоматически переключается в режим "полная остановка" или "холостой ход" по завершении программы массажа. Пожалуйста, нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить кресло.

Технические характеристики

Наименование	Массажное кресло
Модель	Therapeutix 4D SW
Вес нетто	153 кг
Вес брутто	178 кг
Мощность	236 Вт
Входное напряжение	220В ~ 50/60 Гц
Размер упаковки кресла	1460×856×1245 мм (Д×Ш×В)
Размер упаковки подставки для ног	580×555×640 мм (Д×Ш×В)

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Дата производства: смотрите на упаковке.
Сделано в Китае.

тел. 8-800-700-14-29
www.ergonova.ru
nfo@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012 г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Импортёр:
ИП Штукина Елена Александровна
193318, Санкт-Петербург, ул. Бадаева 8, корпус 1А, 695