


Maxima 2

Массажное кресло

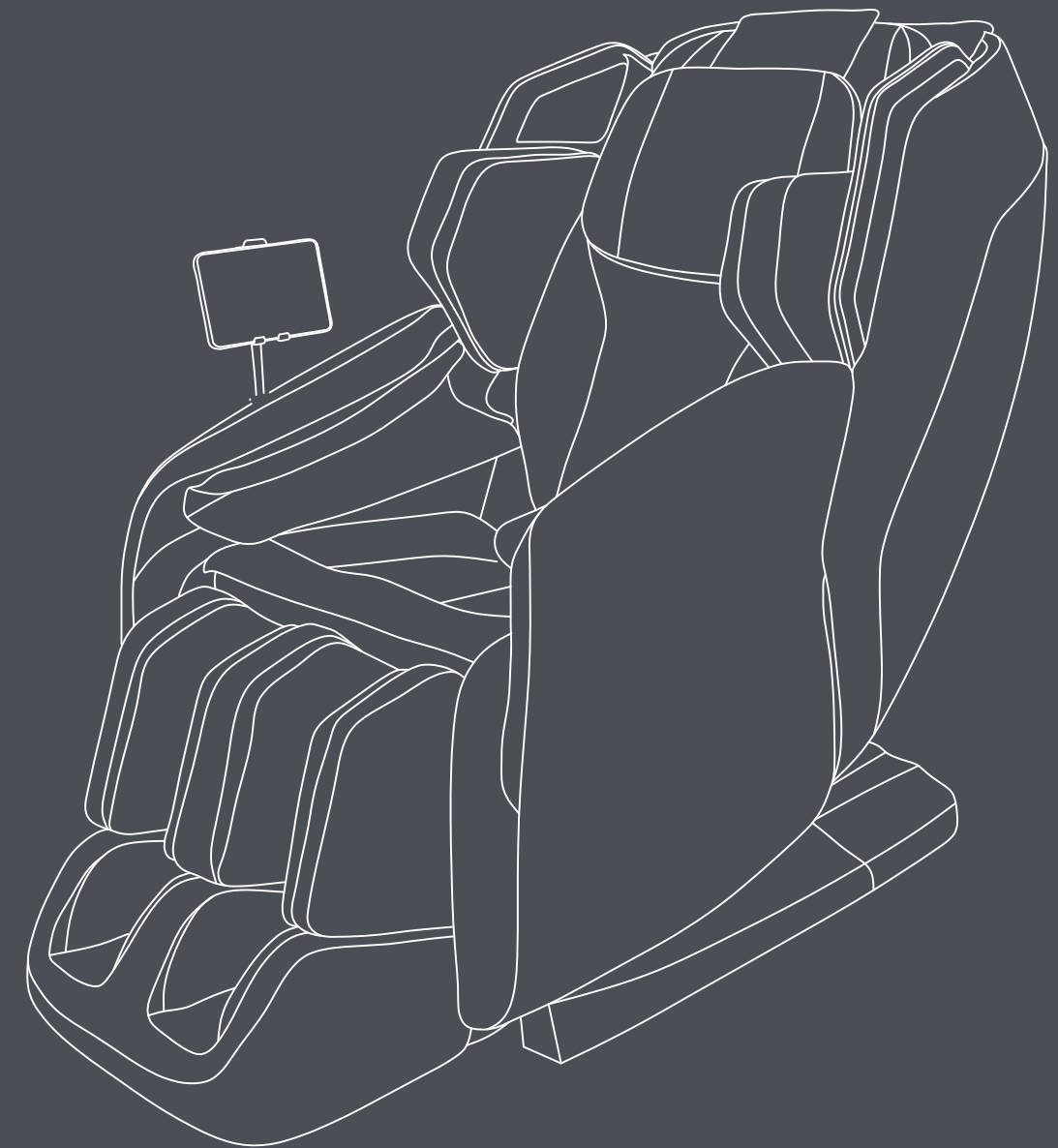

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Maxima 2!

Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться массажным креслом как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova — немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova — надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

Меры предосторожности	2
Наименования деталей	5
Инструкция по сборке и установке	8
Инструкция по эксплуатации	16
Уход и обслуживание	27
Устранение неполадок	28
Технические характеристики	29

Меры предосторожности

Во избежание риска травм, ущерба здоровью и повреждений массажного кресла, внимательно изучите описанные далее меры предосторожности, прежде чем приступать к использованию массажного кресла. Наша компания не несет ответственность за причиненный ущерб здоровью и/или поломку тренажера в результате несоблюдения мер предосторожности и неправильного использования массажного кресла. Перед использованием кресла рекомендовано проконсультироваться с врачом.

1. Противопоказания

Использование массажного кресла противопоказано:

- лицам с остеопорозом, травмами позвоночника, растяжениями и/или другими повреждениями мышц и связок;
- лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями (включая тех, кто использует кардиостимуляторы и другое медицинское электронное оборудование);
- лицам со злокачественными опухолями;
- лицам с нарушениями восприятия из-за диабета или других нарушений работы системы кровообращения;
- лицам с серьезными искривлениями позвоночника;
- лицам с межпозвоночной грыжей;
- беременным женщинам и женщинам в послеродовой период;
- лицам с кожными заболеваниями;
- лицам с нарушениями системы терморегуляции (определение температуры);
- лицам с ярковыраженными симптомами гриппа и/или простуды (высокая температура тела, ломота в теле и т.д.)
- лицам пожилого возраста старше 80 лет;
- лицам с интеллектуальными нарушениями без присмотра ответственных лиц;
- лицам, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться в силу инвалидности или других причин;
- лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- несовершеннолетним лицам без присмотра ответственных лиц.

2. Общие меры предосторожности

- Перед использованием массажного кресла убедитесь, что между движущимися частями изделия нет посторонних предметов.
- Максимальный вес пользователя — 180 кг.
- Не просовывайте пальцы или посторонние предметы в щели между движущимися частями кресла во избежание травм и/ли поломки кресла.

- Не используйте устройство, если ваше тело или одежда влажные.
- Не используйте слишком интенсивные техники массажа в области шеи/головы.
- Не используйте массажное кресло одновременно с другим массажным оборудованием.
- Не вставляйте ногами на массажный блок для ног и/или другие части массажного кресла.
- Не садитесь и не вставайте из кресла слишком резко.
- Не используйте кресло в выключенном состоянии как обычное сиденье.
- Не покидайте кресло во время массажа. При необходимости покинуть кресло, сначала остановите текущий сеанс массажа.
- Внимательно следите за своим самочувствием во время использования массажного кресла. При появлении дискомфорта и/или болевых ощущений, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.



3. Хранение, установка и подключение массажного кресла

- Данное устройство предназначено для домашнего бытового использования. Храните массажное кресло в закрытом помещении вдали от пыли и влаги. Повышенная влажность воздуха, пыль и вода могут привести к поломкам, которые не являются гарантийным случаем.
- Если массажное кресло хранилось при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2-4 часов, после чего можно приступить к эксплуатации.
- Не устанавливайте массажное кресло рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами.
- Сборку и эксплуатацию следует осуществлять на твердой, ровной, нескользящей поверхности. Для снижения шума и вибраций во время использования рекомендуем использовать специальный резиновый коврик.
- Перед установкой и перемещением массажного кресла убедитесь, что переключатель питания на кресле переведен в положение “Выкл.”, а спинка кресла и массажный блок для ног находятся в начальном положении.
- Не скручивайте массажные подушки и обивку при хранении.
- Не запускайте кресло без пользователя на длительное время.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Если кресло не используется продолжительное время, переведите переключатель питания на кресле переведен в положение “Выкл.” и отсоедините кабель питания из кресла и розетки питания.
- Не используйте кресло, если кабель питания неплотно подключен к креслу и/или розетке питания.
- Используйте только подходящие под технические характеристики кресла источники питания во избежание короткого замыкания.



- Не используйте кресло с поврежденным кабелем питания. Не пережимайте, не скручивайте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. При обнаружении повреждений кабеля обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте переходники для вилок. Если вилка устройства не подходит к вашей розетке, не переделывайте её — обратитесь к электрику для установки подходящей розетки.
- Проверяйте внешнюю целостность кресла перед включением. В случае обнаружения повреждений, выключите кресло и обратитесь в сервисный центр.
- В случае неполадок в работе массажного кресла, поломок или других неисправностей, обращайтесь в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно выполнить демонтаж и/или ремонт массажного кресла. В случае обнаружения сотрудниками сервисного центра следов постороннего вмешательства и/или попытки самостоятельно разобрать массажное кресло, гарантия аннулируется.



4. Во время массажа



- Во время использования массажного кресла не подпускайте к устройству детей и/или домашних животных во избежание травм или других несчастных случаев.
- Не засыпайте в кресле во время массажа.
- При первом использовании массажного кресла рекомендуется начинать с легких техник массажа с низкой интенсивностью для минимизации риска получения травм.
- Храните планшет управления в специально отведенной подставке-держателе во время массажа.
- Перед массажем рекомендуется снять с себя все аксессуары и украшения, опустошить карманы одежды во избежание попадания посторонних предметов в механизмы устройства.
- Рекомендуемое время сеанса — 20 минут, повторный сеанс — не ранее чем через 5 минут. Продолжительное непрерывное использование может отрицательно сказаться на здоровье.
- Не отключайте вилку из розетки во время работы.
- Не кладите голову или руки в зону массажа икр.
- После использования всегда отключайте питание и вынимайте вилку из розетки.



Наименования деталей


Внешнее устройство массажного кресла

- 1. Аудиосистема
- 2. Подушка-подголовник
- 3. Правая воздушно-компрессионная подушка
- 4. Левая воздушно-компрессионная подушка
- 5. Подушки для спины
- 6. Планшет управления
- 7. Панель управления
- 8. Правый подлокотник
- 9. Сиденье
- 10. Левый подлокотник
- 11. Блок для массажа икр
- 12. Блок для массажа стоп
- 13. LED-подсветка
- 14. Колеса для перемещения
- 15. Спинка
- 16. Блок питания
- 17. Разъём питания
- 18. Переключатель питания
- 19. Держатель предохранителя

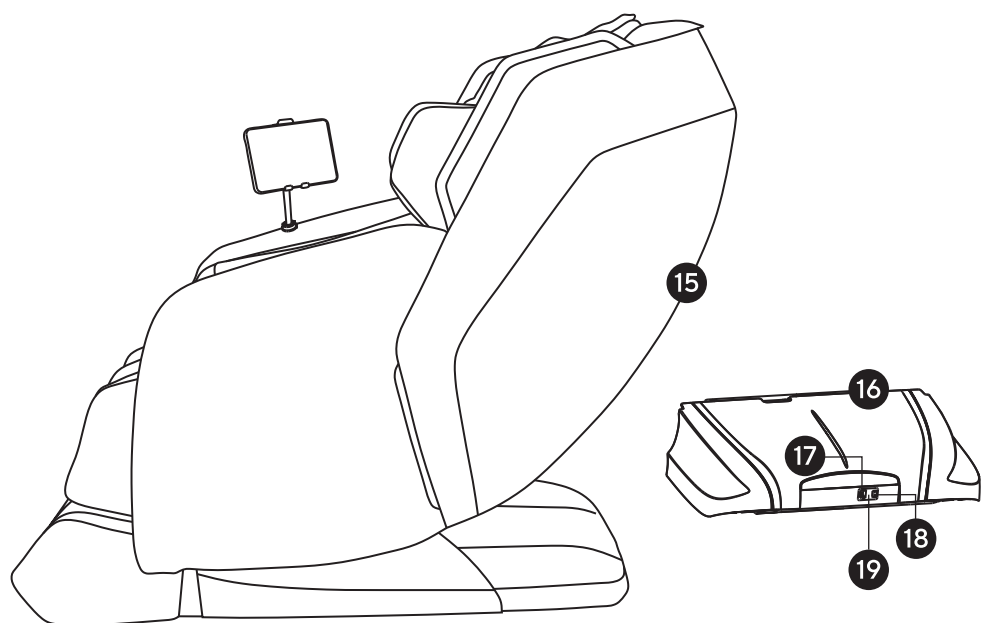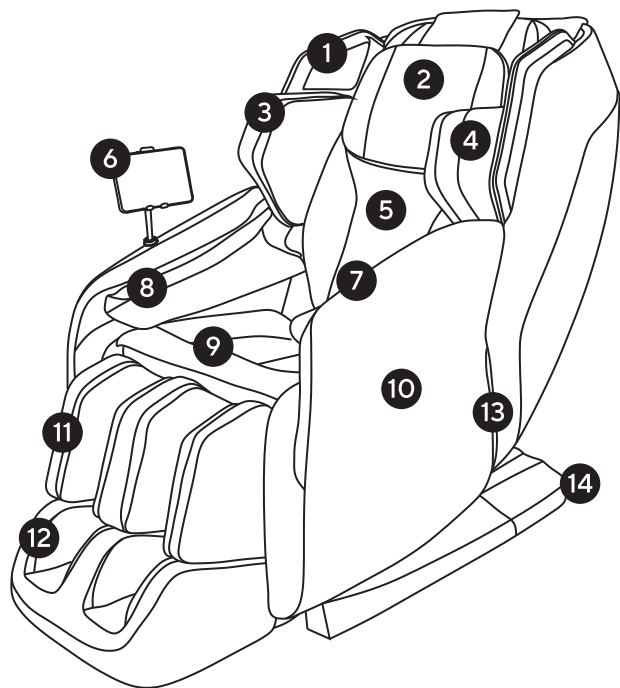

Внутреннее устройство массажного кресла


- 1. Массажные ролики
- 2. Компрессионные подушки для плеч
- 3. Компрессионные подушки для рук
- 4. Компрессионные подушки для икр
- 5. Компрессионные подушки для ступней
- 6. Нагрев стоп
- 7. Шиацу-ролики стоп
- 8. Нагрев поясницы

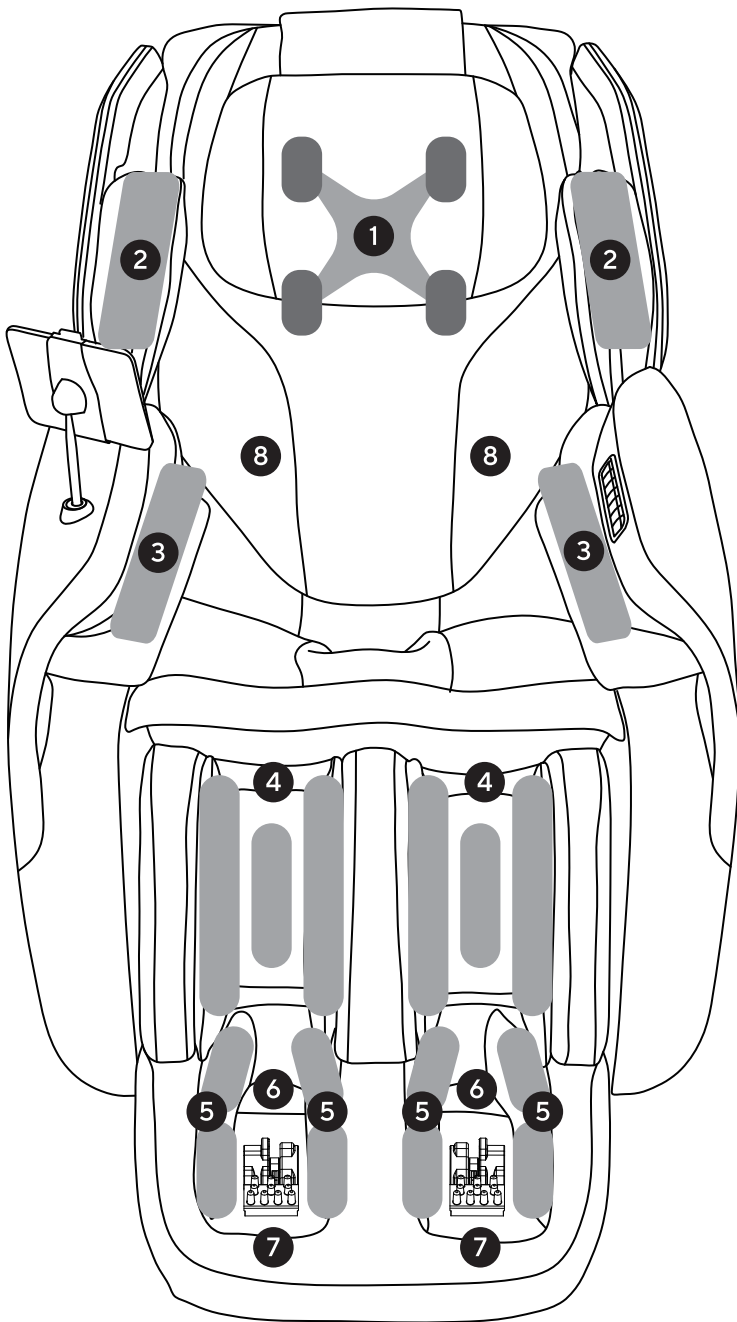

Наименования деталей

Внешнее устройство массажного кресла

- | | |
|--|---|
| 1. Правый подлокотник и плечо в сборе | 14. Рама для переноса левого подлокотника |
| 2. Пульт управления планшетом | 15. Привод опоры для ног |
| 3. Стойка для переоборудования подлокотника в сборе (справа) | 16. Рама сиденья в сборе |
| 4. Правое крыло | 17. Левый подлокотник и плечо в сборе |
| 5. Стержень в сборе с заклепками (справа) | 18. Блок питания в сборе |
| 6. Внутреннее крыло (справа) | 19. Задняя крышка в сборе |
| 7. Привод спинки | 20. Крышка спинки сиденья в сборе |
| 8. Нижнее сиденье в сборе | 21. Каркас спинки в сборе |
| 9. Переднее крыло | 22. Массажный механизм в сборе |
| 10. Подставка для ног в сборе | 23. Передняя крышка в сборе |
| 11. Стержень в сборе с заклепками (слева) | 24. Подушка заднего сиденья |
| 12. Соединительная пластина для ног в сборе | 24. Подушка на плечо |
| 13. Левое крыло | 26. Подушка в сборе |

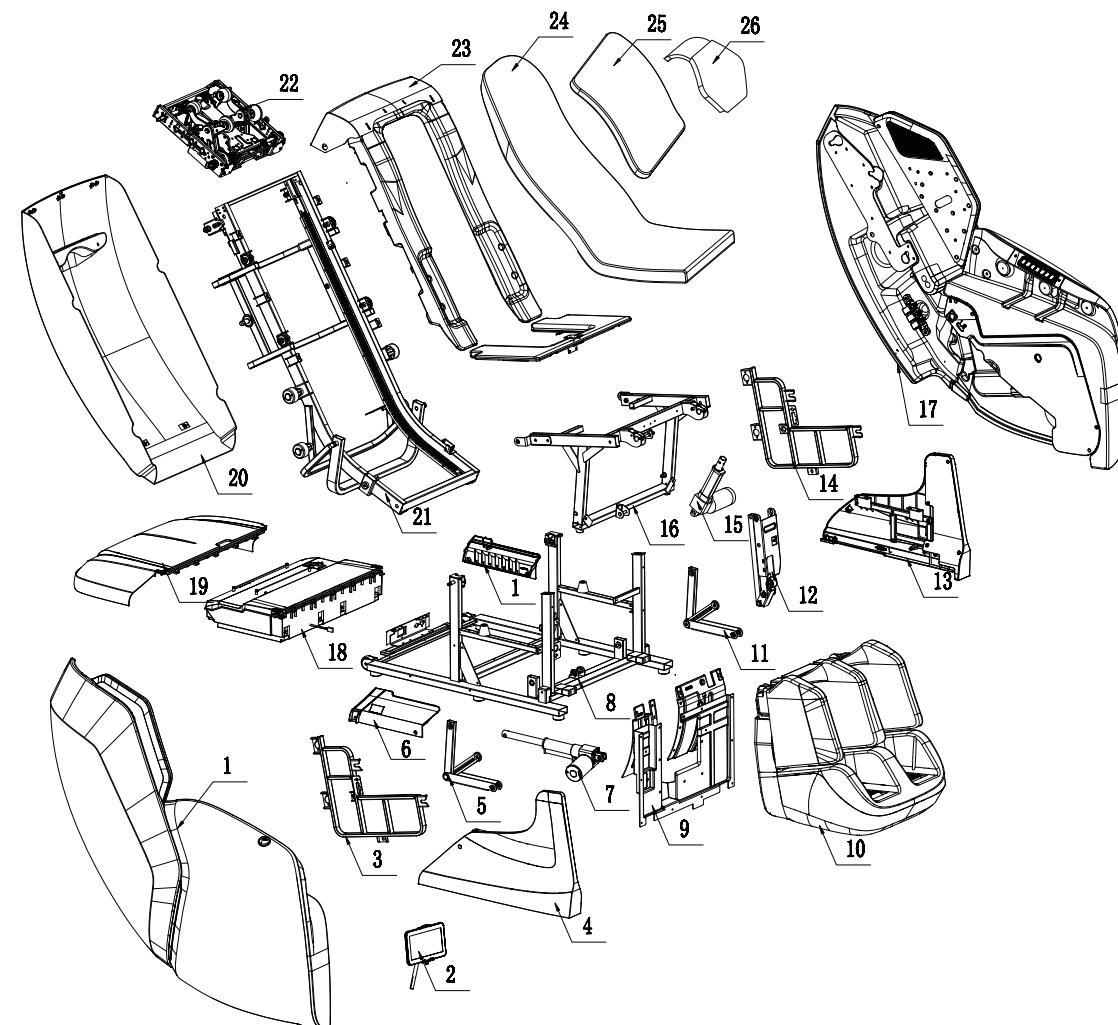


Инструкция по сборке и установке

1. Выбор места установки


Определите место для установки. Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его наклона. Минимальные расстояния:

- Не менее 50 см от стены — спереди кресла.
- Не менее 32 см от стены — сзади кресла.

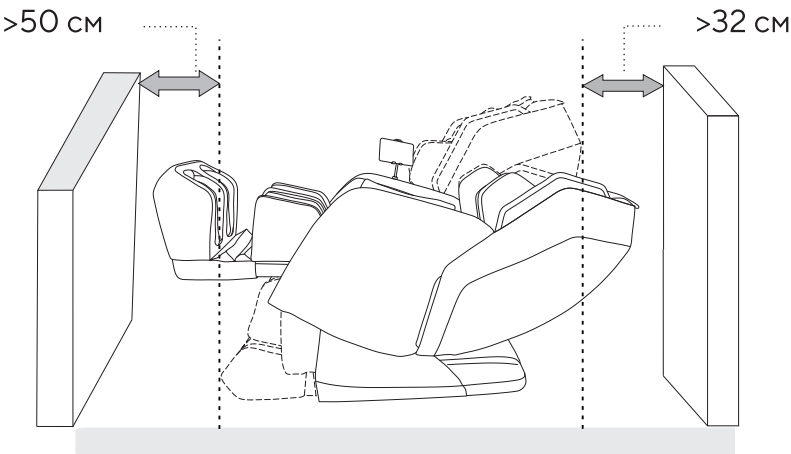

Примечание ⚠

- Иногда кресло может повредить напольное покрытие, поэтому рекомендуется постелить ковёр или защитный мат под основание.
- Перед установкой подготовьте коврик, который полностью закроет поверхность под креслом.
- Не используйте и не храните кресло в бассейне, ванной или других влажных помещениях.
- Устанавливайте кресло на ровной поверхности.
- Не размещайте кресло рядом с обогревателями, каминами и другими нагревательными приборами. Высокая температура может привести к выцветанию ткани, изменению цвета или затвердеванию искусственной кожи.

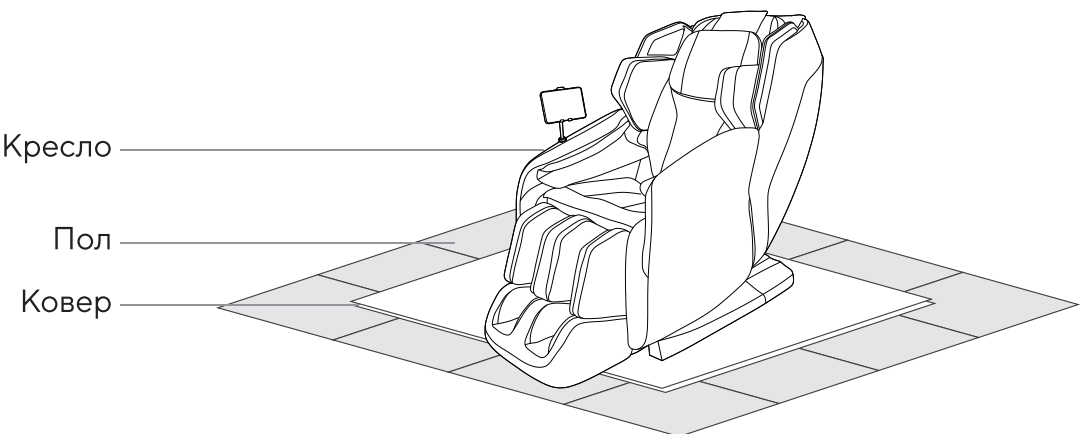


2. Извлечение из упаковки

Достаньте подножку, основную часть и аксессуары из коробки. Возьмитесь обеими руками за подножку с левой и правой стороны и аккуратно поднимите её, вытащив из посадочного места на основном корпусе кресла. Извлеките коробку с аксессуарами и остальные детали. Проверьте комплектность всех деталей.


Примечание ⚠

- Основной корпус кресла необходимо вынимать не менее чем двумя людьми. Одной рукой — нижнюю переднюю часть подлокотника, другой рукой — нижнюю заднюю часть в области плеч. Поднимайте медленно и осторожно.

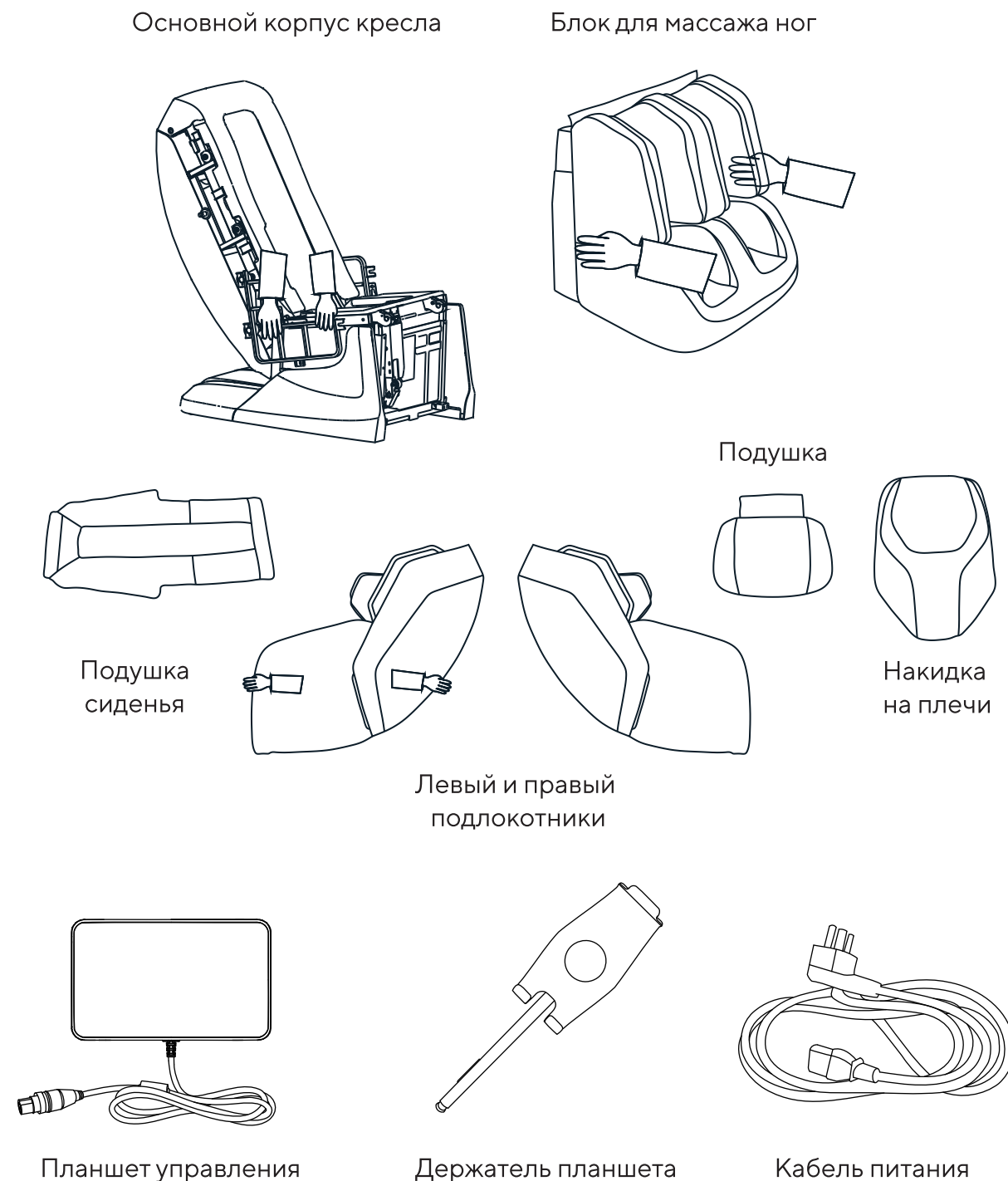

3. Подготовка и подключение

- Совместите разъём кабеля планшетного пульта с разъёмом на правой стороне сиденья и подключите его, после чего зафиксируйте гайкой.
- Подключите кабель питания: один конец в блок питания, второй конец в розетку. Включите переключатель питания.
- На планшете управления нажмите кнопку выбора положения, затем нажмите кнопку «нулевая гравитация». В этот момент спинка опускается, сиденье поднимается. После того как спинка полностью опустится, планшет можно временно разместить на сиденье. После этого выключите питание.


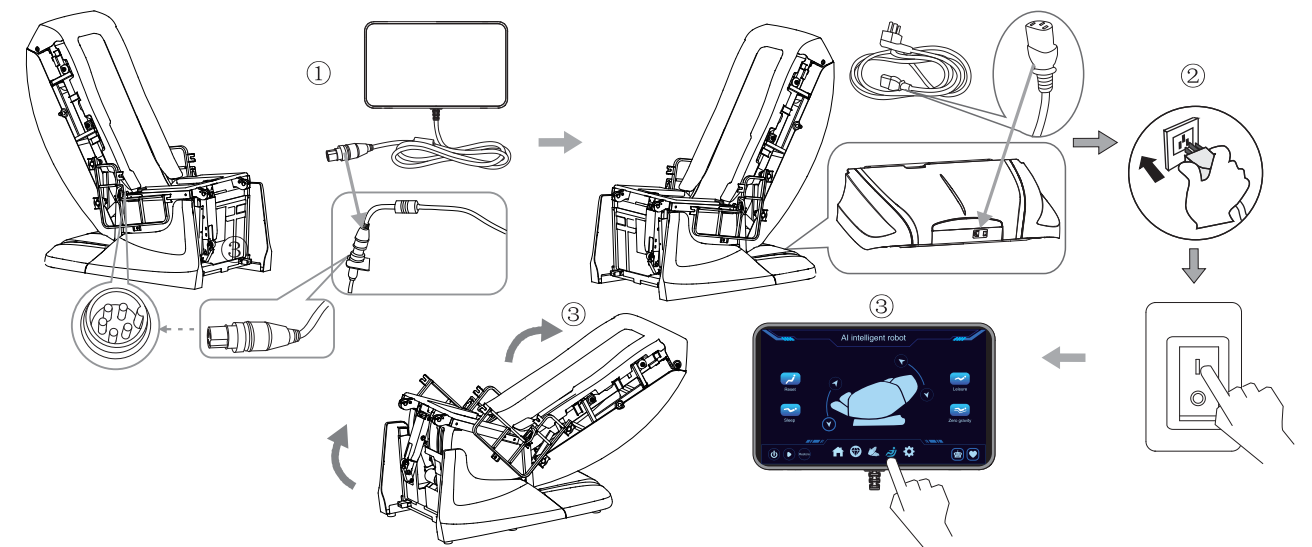


4. Установка подлокотников

- Снимите внутреннюю защитную панель подлокотника.
- Поднесите подлокотник к боковой части кресла и совместите 3 отверстия крепления с направляющими на спинке. Вставьте подлокотник в крепления.
- Вставьте нижние крепёжные элементы подлокотника в каркас сиденья и опустите подлокотник вниз до упора.
- Подключите воздушные трубки и электрические кабели.
- Зафиксируйте подлокотник с помощью 2 винтов M6×16 с шайбами (с помощью шестигранного ключа).
- Установите внутреннюю панель обратно, зафиксировав её защёлками и винтами 3.9×12.7.
- Повторите те же действия для второго подлокотника.
- После установки включите питание, выполните возврат кресла в исходное положение и снова выключите питание.


Примечание ⚠

- Не пережимайте воздушные трубки — это может привести к утечке воздуха или неисправности подушек.
- Убедитесь, что все соединения выполнены надёжно, иначе подлокотник может отсоединиться или не будут работать пульт и динамики.

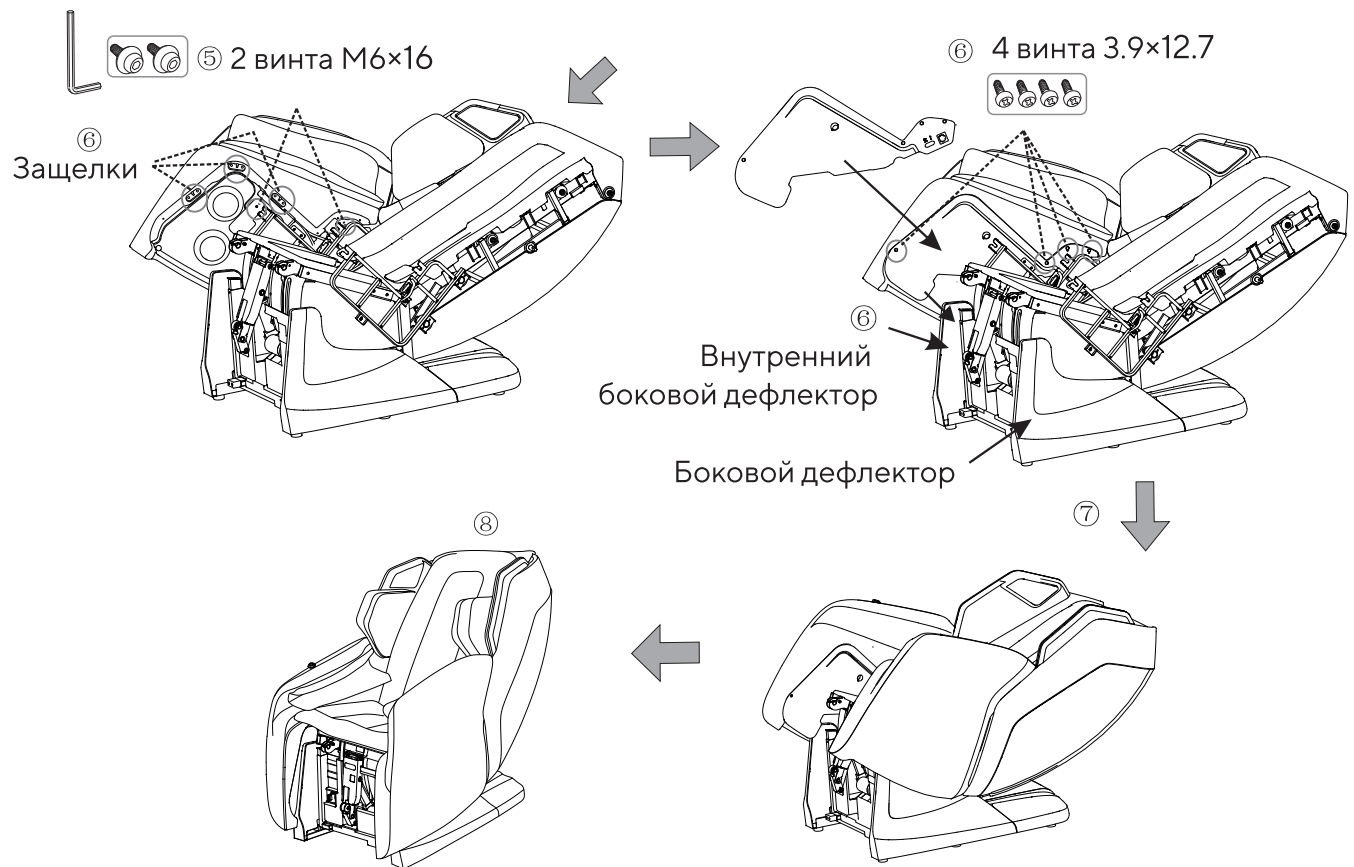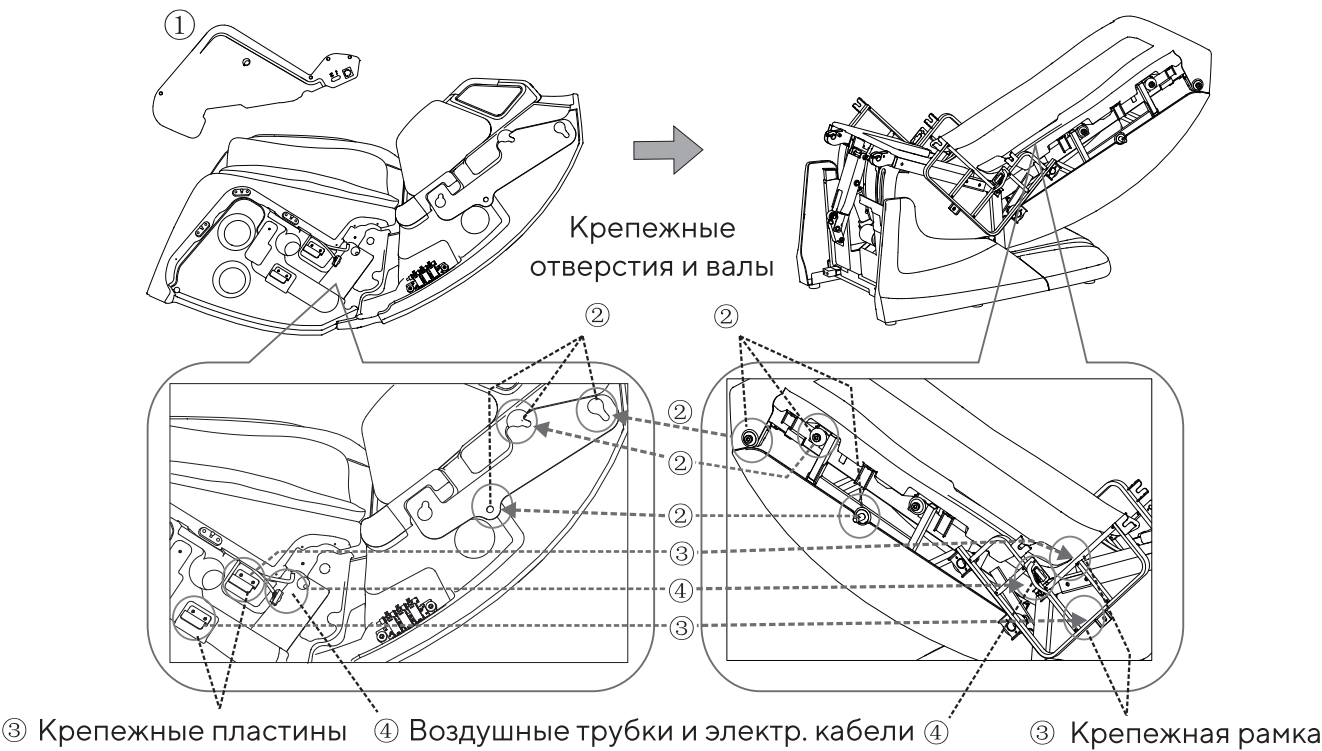

5. Установка подножки

1. Открутите болт с металлического крепления подножки.
2. Подключите разъёмы проводов подножки к соответствующим разъёмам на корпусе.
3. Подключите воздушные трубки подножки к соответствующим разъёмам.
4. Откройте крышку шарнира на металлическом креплении. Поднимите подножку и установите ось в крепление корпуса.
5. Закройте крышку шарнира. Затяните болт.

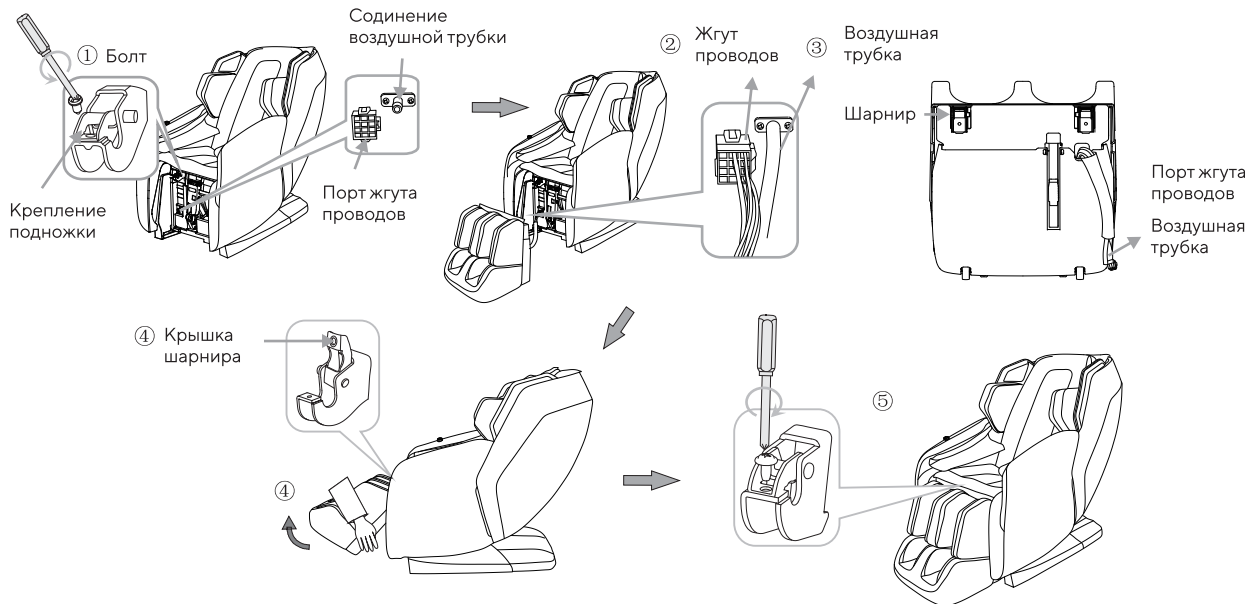


Примечание ⚠

- Убедитесь, что провода и воздушные трубки не пережаты.


6. Установка держателя планшета

1. Вставьте держатель планшета в основание, совместив форму крепления. Убедитесь, что фиксирующий болт установлен правильно.
2. Установите планшетный пульт в держатель.

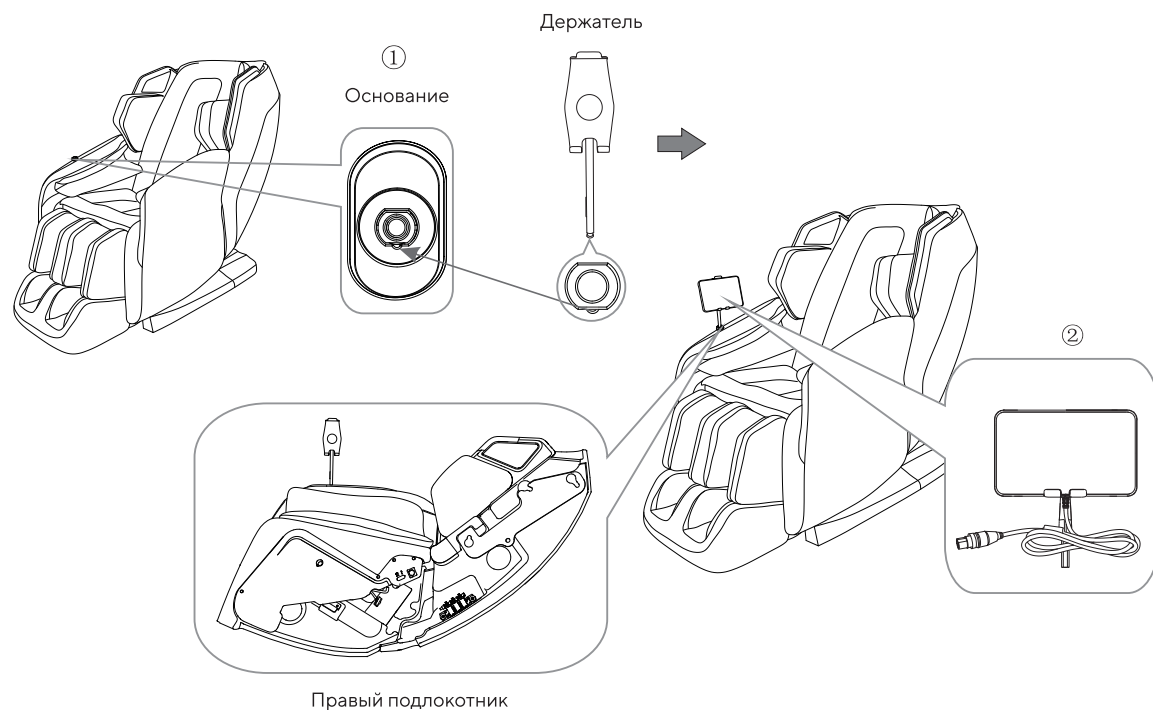

7. Подключение обивки и подушек

1. Подключите провод нагрева спинки и сиденья перед закрытием обивки.
2. Соедините спинку и заднюю часть кресла с помощью молнии.
3. Соедините боковые части спинки с помощью молнии.
4. Закрепите сиденье на каркасе с помощью липучек. Соедините переднюю часть сиденья и обивку подножки с помощью молнии.

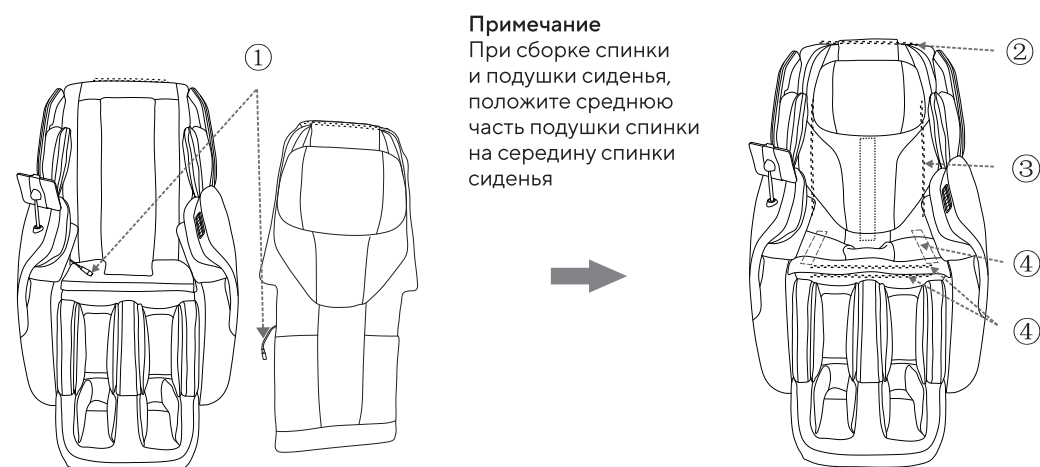

Примечание ⚠

- Для точного сканирования тела: сначала сядьте в кресло, затем установите подушку так, чтобы её нижний край находился на уровне ушей пользователя.




8. Установка держателя планшета

1. Подключите вилку питания к разъёму блока питания под спинкой кресла.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите переключатель питания (положение «I»).
4. Используйте кнопки быстрого доступа на подлокотнике или планшетный пульт для выбора режима массажа. Наслаждайтесь расслабляющим массажем.

Важно! ⚠

- Перед подключением питания убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено».

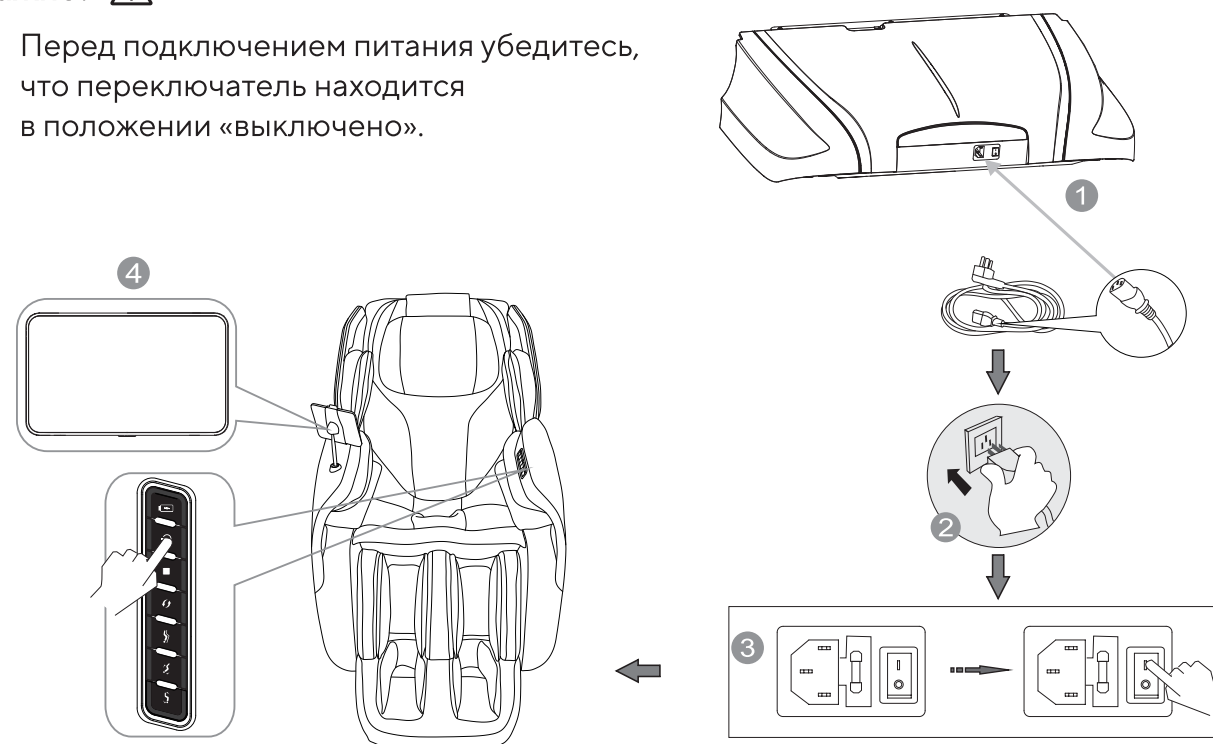

9. Условия эксплуатации


Примечание ⚠

- Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Это может привести к повреждению обивки.
- Не используйте кресло во влажных местах (бассейн, ванная). Это может привести к утечке тока или поражению электрическим током.

Проверка пространства


Перед использованием убедитесь, что:

- рядом нет людей
- нет животных
- нет посторонних предметов

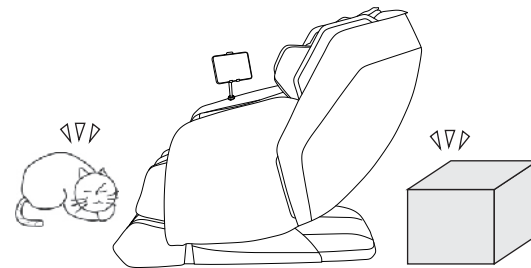

Пространство для использования

- Минимум 32 см от стены.
- Минимум 50 см перед креслом.

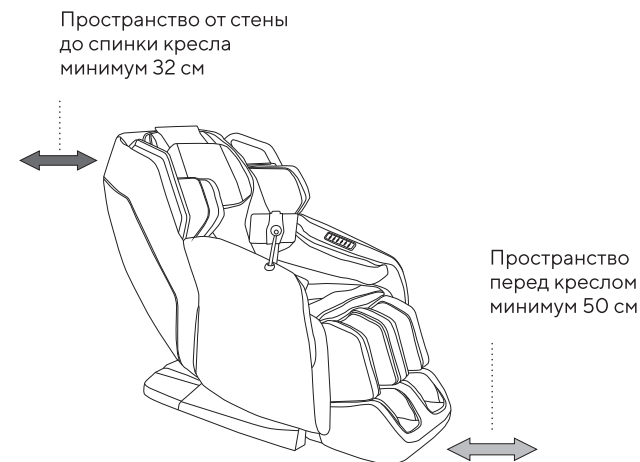


Примечание ⚠

- При изменении положения спинки или подножки убедитесь, что вокруг нет препятствий.

Перемещение кресла

1. Встаньте за креслом, возьмитесь обеими руками за спинку кресла в районе головы.
2. Потяните кресло на себя, наклоняя его не более чем на 40°, чтобы задние колёсики касались пола.
3. Плавнo переместите кресло в нужное место, толкая его перед собой.
4. Осторожно опустите кресло.

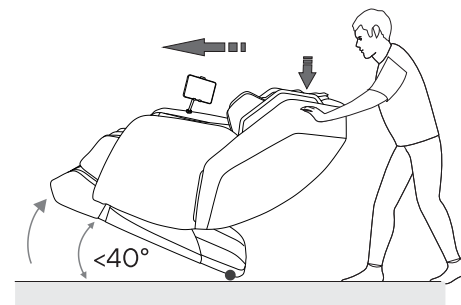


Примечание ⚠

- Не перемещайте кресло, когда оно работает — это может привести к повреждению или несчастному случаю.
- Перед перемещением отключите питание и выньте вилку из розетки. Разместите кабель питания на сиденье, чтобы не повредить его.
- Не тяните кресло за подлокотники.

Управление креслом

1. Описание встроенного блока управления

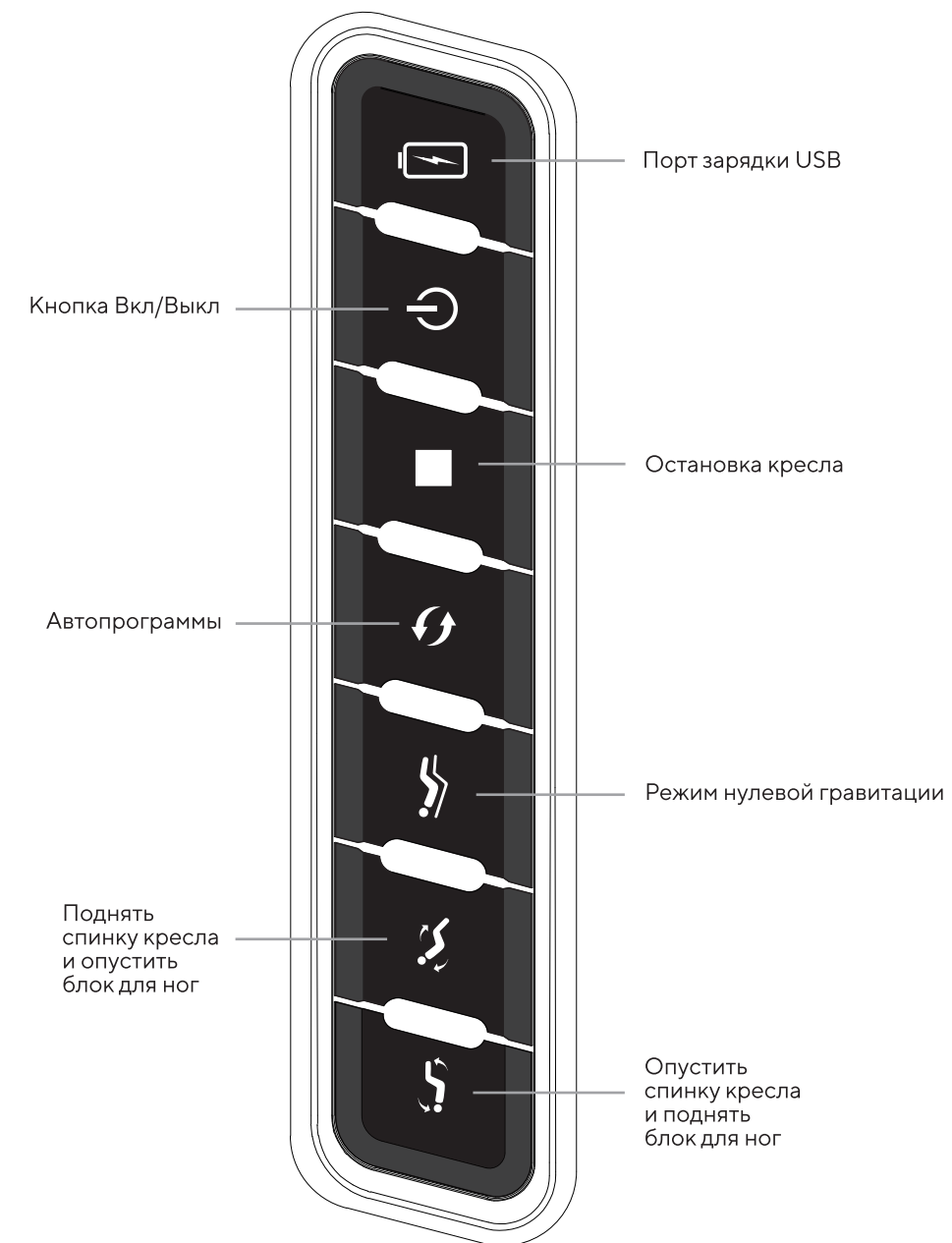

Откройте крышку и подключите устройство к разъёму Type-C для зарядки мобильного телефона.



В режиме ожидания индикатор кнопки мигает. Нажмите один раз, чтобы активировать и включить кресло — индикатор будет гореть постоянно. Нажмите повторно, чтобы выключить массажное кресло.

Если кресло находится в режиме аварийной остановки, нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд, чтобы выключить кресло.



Во время работы массажного кресла, если возникает экстренная ситуация и необходимо срочно остановить кресло, нажмите эту кнопку. После нажатия индикатор будет гореть постоянно.

Повторное нажатие этой кнопки отключает действие всех остальных кнопок. Для полного выключения удерживайте кнопку питания не менее 3 секунд.



При включенном питании нажмите эту кнопку для перехода в режим «Быстрое расслабление». Повторное нажатие — режим «Традиционная китайская медицина». Следующее нажатие — режим «Растяжка мышц». Следующее нажатие — режим «Облегчение боли».

Четыре автоматические программы переключаются последовательно. Индикатор горит постоянно.



При включенном питании нажмите эту кнопку, чтобы перевести кресло в положение «нулевая гравитация». Нажмите кнопку повторно, чтобы вернуть кресло в исходное положение.

Переключение происходит циклически.




При включенном состоянии удерживайте эту кнопку, чтобы поднять спинку и опустить подножку. Отпустите кнопку для остановки движения.




При включенном состоянии удерживайте эту кнопку, чтобы опустить спинку и поднять подножку. Отпустите кнопку для остановки движения.

2. Описание планшета управления

После включения кресла планшет включается автоматически и отображает главный экран. Если не выполнять никаких действий более 2 минут, экран погаснет.

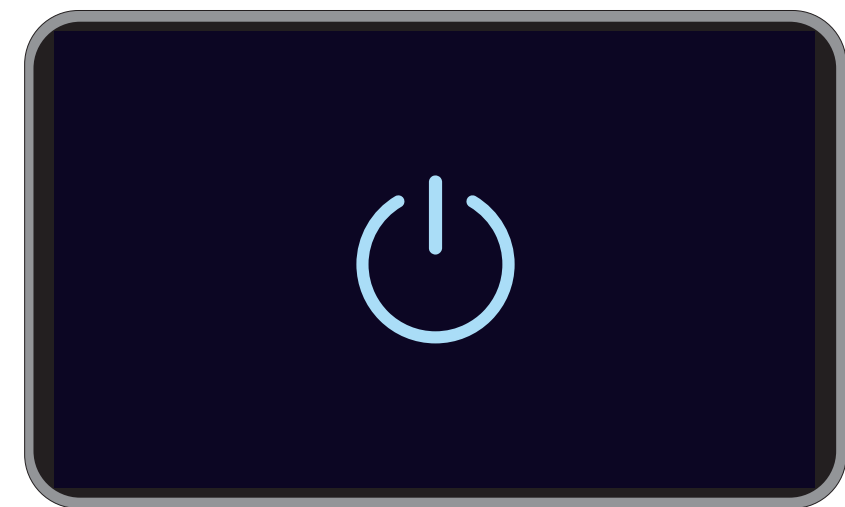


Интерфейс массажных режимов

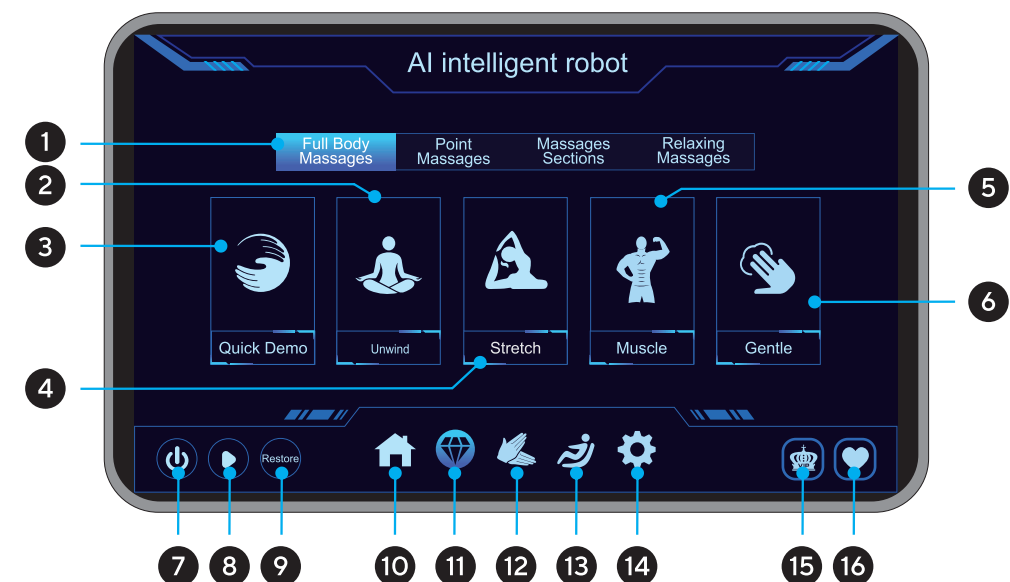

1. **Interface Switch** — переключение между разделами меню: Массаж всего тела (Full Body Massages), Точечный массаж (Point Massages), Разделы массажа (Massages Sections), Расслабляющие массажи (Relaxing Massages).
2. **Quick Demo** — быстрая демонстрация программы: при включённом питании нажмите значок — начнётся автоматический массаж-демонстрация, длительность по умолчанию 8 минут.
3. **Unwind** — релакс-программа: при включённом питании нажмите значок — запустится автоматический расслабляющий массаж, длительность 20 минут.
4. **Stretch** — программа растяжки: при включённом кресле нажмите, чтобы запустить автоматическую программу «Растяжка». Время работы по умолчанию — 20 минут.

5. **Muscle** —массаж мышц: при включённом кресле нажмите, чтобы запустить автоматическую программу «Мышцы». Время работы по умолчанию — 20 минут.
6. **Gentle** — программа «Деликатный массаж»: при включённом кресле нажмите, чтобы запустить автоматическую программу «Деликатный массаж». Время работы по умолчанию — 20 минут.
7. **On/Off** — включение/выключение
8. **Pause / Recover** — пауза, восстановление работы: после нажатия индикатор загорается, и кресло готово к работе.
9. **Restore** — сброс параметров: после выбора этой функции кресло не возвращается в вертикальное положение после массажа. Если функция не выбрана — кресло возвращается в исходное состояние автоматически.
10. **State Interface** — экран состояния: переход на главный экран.
11. **Auto Massage** — автоматический массаж: переход в меню автоматических программ массажа.
12. **Manual Massage** — ручной режим: переход в режим ручного управления массажем.
13. **Position Adjustment** — регулировка положения: переход в меню регулировки положения кресла.
14. **Settings** — настройки: нажмите, чтобы перейти в меню настроек.
15. **AI Customized** — индивидуальные настройки ИИ: индивидуальные настройки, управляемые искусственным интеллектом.
16. **Save** — сохранение параметров: переход в раздел «Избранное» для сохранения или удаления любимых программ.


Интерфейс массажа

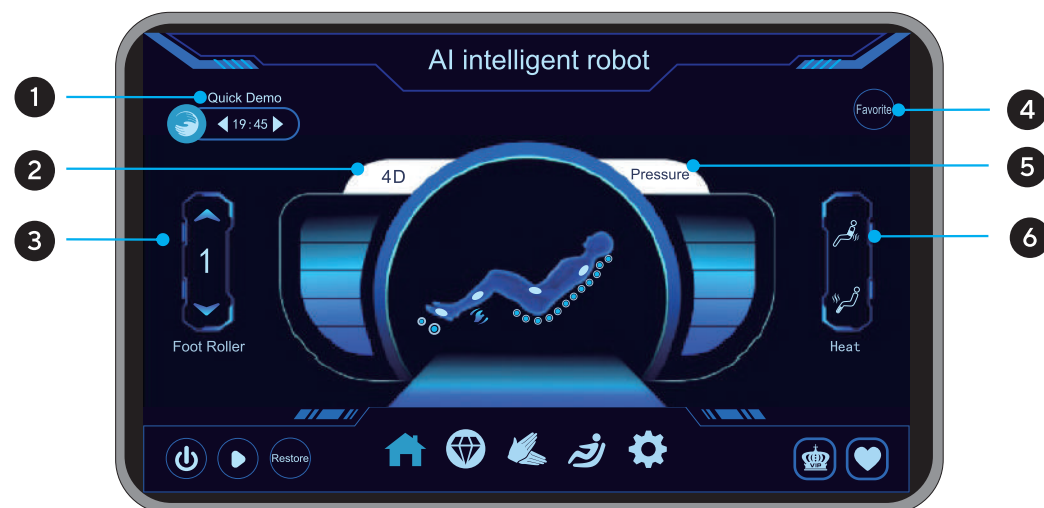

1. Текущий режим массажа и оставшееся время.
2. Регулировка интенсивности 4D — увеличение/уменьшение интенсивности работы массажных роликов верхней каретки.


3. **Роликовый массаж ступней** — включение/выключение роликового массажа ступней. Если не активирована функция аэромассажа, включение роликов также активирует воздушные подушки для ног и икр.
4. **Добавить в избранное** — добавление текущих настроек массажа в избранное. Настройки сохраняются даже при отключении питания. Если сохранено больше 8 режимов, появится напоминание удалить старые перед сохранением новых.
5. **Регулировка интенсивности аэромассажа** — увеличение/уменьшение интенсивности воздействия воздушных подушек.
6. **Подогрев поясницы и ног** — увеличение/уменьшение интенсивности нагрева, доступно три уровня.

Интерфейс точечного массажа

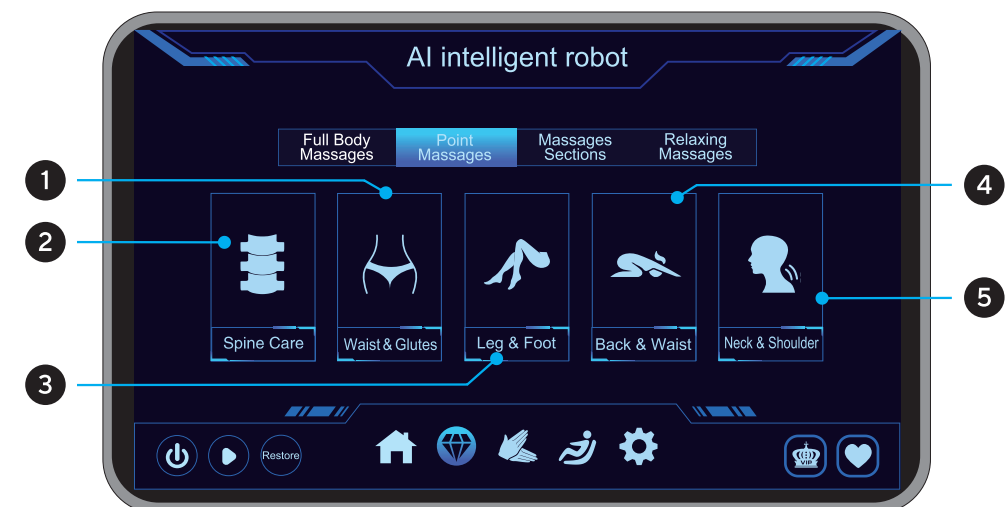


1. **Waist & Glutes** — Массаж талии и ягодиц.
2. **Spine Care** — Уход за позвоночником.
3. **Leg & Foot** — Массаж ног и стоп.
4. **Back & Waist** — Массаж спины и поясницы.
5. **Neck & Shoulder** — Массаж шеи и плеч.

Интерфейс разделов массажа

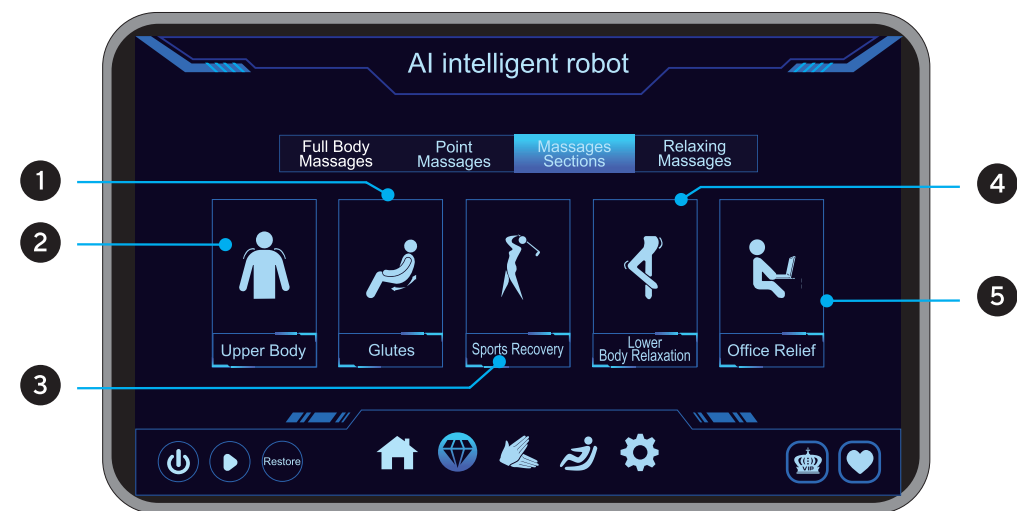


- 1. **Glutes** — Массаж ягодиц.
- 2. **Upper Body** — Массаж верхней части тела.
- 3. **Sports Recovery** — Восстановление после спорта.
- 4. **Lower Body Relaxation** — Расслабление нижней части тела.
- 5. **Office Relief** — Массаж для людей с сидячей работой.

Интерфейс расслабляющих массажей

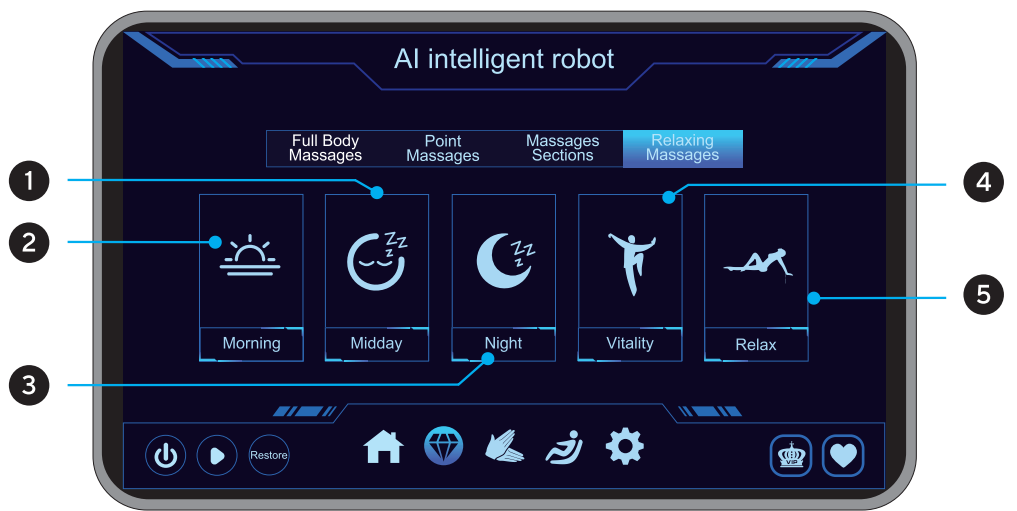


- 1. **Midday** — Программа «Полдень».
- 2. **Morning** — Программа «Утро».
- 3. **Night** — Программа «Ночь».
- 4. **Vitality** — Программа «Энергия».
- 5. **Relax** — Программа «Расслабление».

Интерфейс регулировки положения кресла

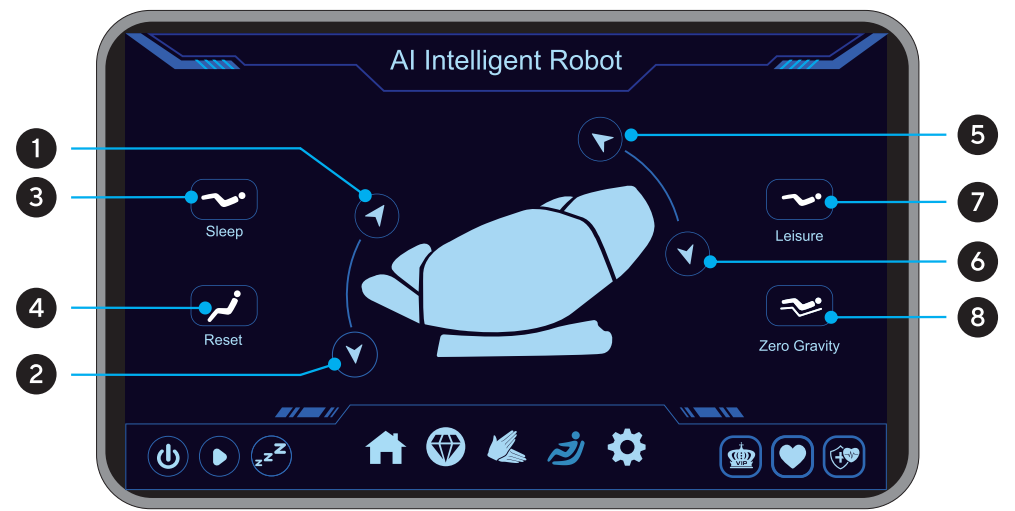

- 1. Подъём блока для массажа ног.
- 2. Опускание блока для массажа ног.
- 3. **Sleep** — Положение для сна.
- 4. **Reset** — Возврат в исходное положение.
- 5. Подъем спинки.
- 6. Опускание спинки.
- 7. **Leisure** — Положение для отдыха.
- 8. **Zero Gravity** — Положение невесомости.


Интерфейс ручной настройки массажа

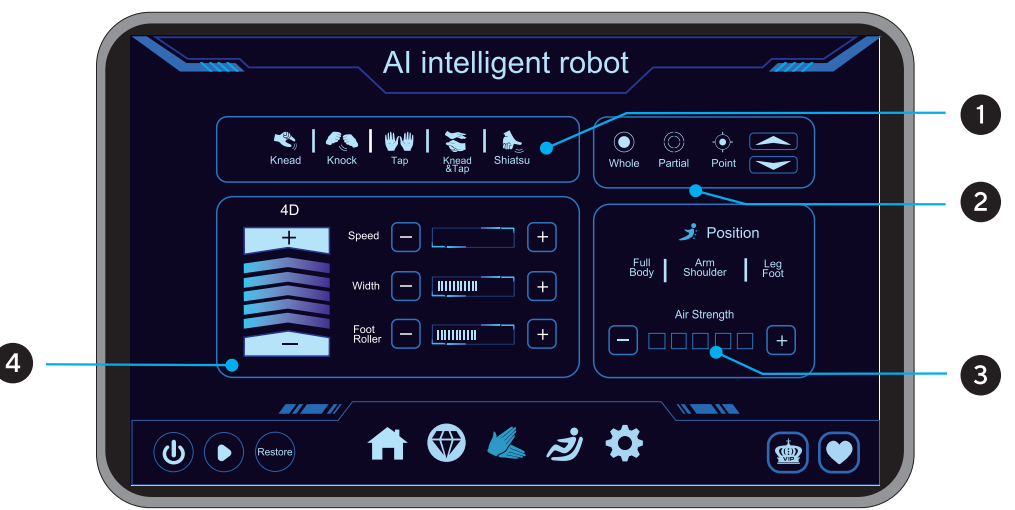

- 1. **Выбор техники массажа** — Используется для выбора типа массажа: разминающий, постукивающий, похлопывающий, разминающий + похлопывающий, Шиatsu.


2. **Выбор зоны массажа и регулировки фиксированной точки (вверх/вниз)** — После входа в ручной режим можно выбрать нужную зону массажа.
3. **Выбор области и регулировки интенсивности воздушного массажа** — Позволяет выбрать область действия воздушных подушек и отрегулировать давление воздуха.
4. **Регулировка 4D-массажа** — регулировка скорости, ширины и положения роликов.

Индивидуальный режим массажа — роликовый массаж

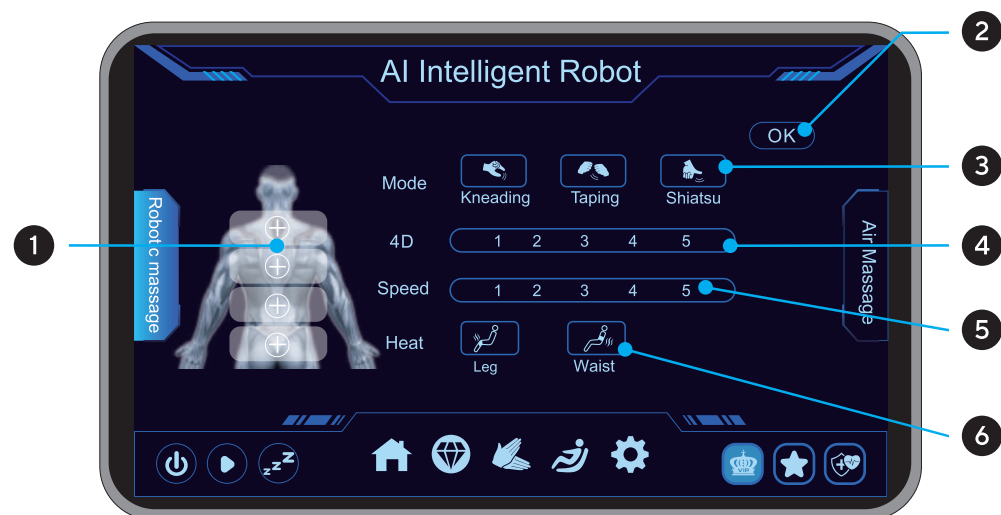

1. **AI-настройка зон массажа** — с помощью кнопок AI Customized Position можно выбрать одну из четырёх зон: шея и плечи, спина, поясница и бёдра — с соответствующим отображением на экране. При переходе из этого интерфейса в другие выбранное положение и настройки сохраняются.
2. **Кнопка ОК** — после выбора всех параметров нажмите кнопку, чтобы запустить индивидуальный массаж.
3. **Выбор позиции и техники массажа** — после выбора зоны пользователь может выбрать технику массажа. После выбора техники уровень интенсивности 4D и скорость по умолчанию устанавливаются на уровень 3. Функция 4D недоступна для области поясницы и бёдер.
4. **Регулировка интенсивности 4D** — панель регулировки силы массажа (по умолчанию уровень 3).
5. **Регулировка скорости механизма массажа** — панель регулировки скорости массажа (по умолчанию уровень 3).
6. **Настройка подогрева** — можно включить нагрев поясницы и ног.


Индивидуальный режим массажа — аэромассаж

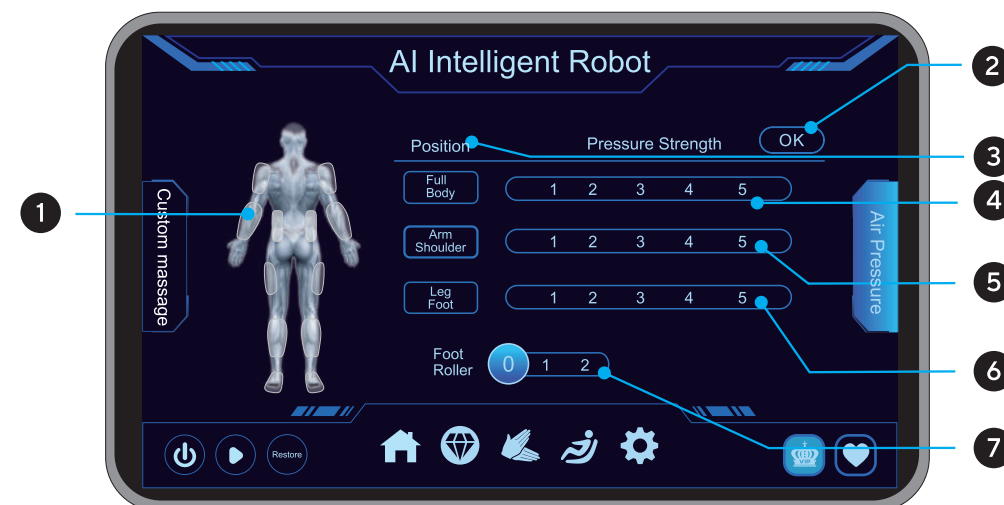


1. **Отображение состояния воздушных подушек по всему телу** — подсвеченные зоны на схеме означают, что они активированы.
2. **Кнопка ОК** — после выбора всех параметров нажмите кнопку, чтобы запустить индивидуальный массаж.
3. **Выбор зоны аэромассажа** — позволяет выбрать нужную область, после чего можно регулировать уровень интенсивности.
4. **Общая регулировка интенсивности воздушного массажа** — настройка давления воздуха по всему телу (по умолчанию — уровень 3).
5. **Регулировка давления воздуха в верхней части тела** — настройка интенсивности в области рук и плеч (по умолчанию — уровень 3).
6. **Регулировка давления воздуха в области ног и ступней** — настройка интенсивности в области ног и ступней (по умолчанию — уровень 3).
7. **Регулировка роликов для ступней** — управление интенсивностью массажа стоп.

1. Интерфейс избранного

Можно сохранить до восьми программ. Нажмите на программу, чтобы выбрать её. Чтобы удалить программу из списка избранных — удерживайте кнопку программы. Ручной режим нельзя сохранить. Сохранённые программы не удаляются даже при отключении питания.

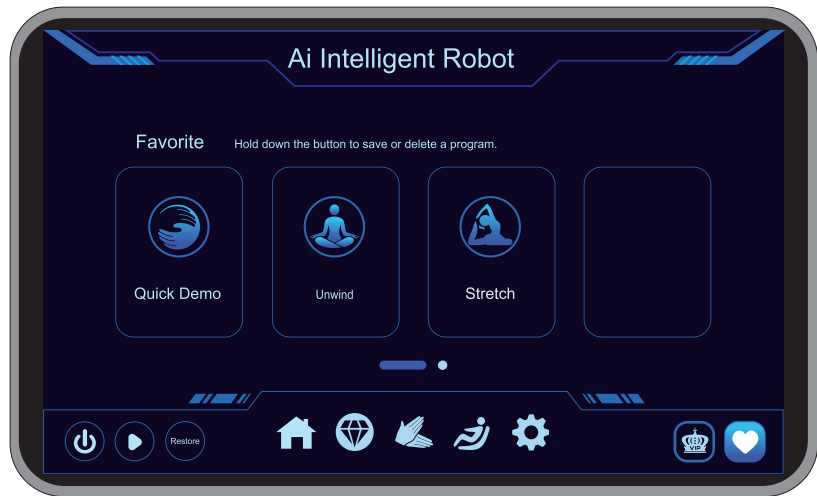

Интерфейс настроек

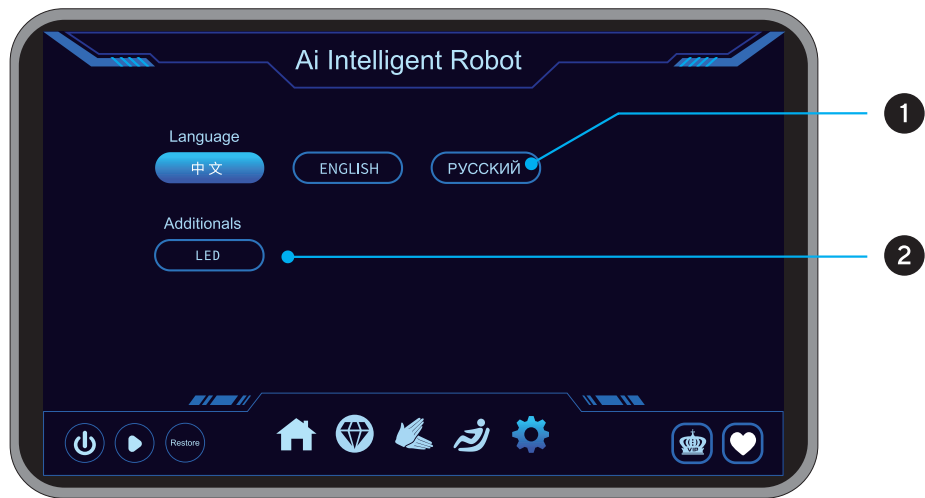

- 1. Выбор языка
- 2. Дополнительная функция — можно включить или выключить светодиодную подсветку.

Интерфейс сканирования тела



- 1. Обнаружение формы тела — текст на экране: *Отрегулируйте положение тела. Сядьте, плотно прижав спину к спинке кресла. Положите голову на подушку, а таз — в самую глубокую часть кресла. Идёт сканирование, пожалуйста, подождите....*
- 2. Ручная регулировка высоты плеч — после завершения сканирования система переходит к интерфейсу ручной регулировки высоты плеч. Используйте кнопки регулировки вверх/вниз, чтобы при необходимости скорректировать высоту плеч.

После массажа

Возврат массажного кресла в исходное состояние

- 1. Убедитесь, что в зоне движения спинки и блока для массажа ног нет людей, животных или посторонних предметов.
- 2. Используйте планшет или панель управления, чтобы медленно спинку и блок для массажа ног в исходное положение. (Можно также просто нажать кнопку питания, чтобы кресло автоматически вернулось в исходное положение.)
- 3. После завершения уберите планшет управления на держатель, расположенный на правом подлокотнике.
- 4. Выключите питание кресла.
- 5. Отключите вилку из розетки.
- 6. Проведите уборку и очистку кресла.

- Примечание ⚠
- Не тяните за шнур при отключении вилки.
 - Избегайте влаги, пыли и повреждения изоляции кабеля.

Уход и обслуживание

Искусственная кожа

- Общий уход
 - Протирайте мягкой, сухой и чистой тканью. (Химические и медицинские средства запрещены.)
- Если кожа загрязнена
 - Смочите мягкую ткань в 3–5% растворе нейтрального моющего средства, слегка отожмите и аккуратно протрите загрязнённый участок.
 - Прополощите ткань, отожмите и протрите поверхность.
 - Высушите мягкой сухой тканью и дайте высохнуть естественным образом (не используйте фен).

Пластиковые детали и тканевые материалы

- Смочите ткань в нейтральном моющем средстве, отожмите и протрите.
- Протрите тканью, смоченной водой и отжатой.
- Высушите мягкой сухой тканью и дайте высохнуть естественным образом (не используйте фен).

Пульт управления

- Протрите мягкой, слегка влажной тканью. Запрещено использовать чистящие аэрозоли, растворители и спирт.
- Высушите мягкой сухой тканью и дайте высохнуть естественным образом (не используйте фен).

Общие рекомендации по чистке ⚠

- Перед чисткой отключите питание и не трогайте вилку мокрыми руками. Убедитесь, что руки сухие при подключении вилки к розетке. Несоблюдение этих правил может привести к удару током или ожогу.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает после включения питания.	Тумблер питания не включен	Включите питание.
	Не выбрана функция массажа.	Выберите режим массажа.
	Плохой контакт вилки и розетки.	Проверьте подключение.
	Повреждён провод или вилка.	Замените по рекомендации сервиса
	Перегорел предохранитель.	Замените по рекомендации сервиса
Во время массажа слышен писк или шум.	Это звук работы насоса, мотора и механических частей.	Это нормальное явление.
Левый и правый ролики движутся на разной высоте.	Ролики работают попеременно и независимо друг от друга	Это нормальное явление.
Звук резко усилился во время работы.	Кресло работает слишком долго.	Выключите питание и дайте креслу отдохнуть 30 минут.
	Износ внутренних деталей при длительной эксплуатации — это нормально.	При необходимости обратитесь в сервис.
Функция массажа внезапно остановилась	Произошло отключение питания.	Подключите питание снова.
	Вышло время работы программы.	Выключите питание и дайте креслу отдохнуть 30 минут.
Спинка или подставка ног не опускаются.	Препятствие, перегрузка кресла — система автоматически останавливается.	Уберите препятствие, для выключите питание, дайте креслу отдохнуть 30 минут.
	На блоке питания находятся тяжёлые предметы.	Снимите их и перезапустите кресло.
Шнур питания или вилка нагреваются.	Перегрузка устройства.	Проверьте подключение. Выключите питание и дайте креслу остыть 30 минут

Технические характеристики

Наименование	Массажное кресло
Модель	Maxima 2
Мощность	220 Вт
Входное напряжение	220В ~ 50/60 Гц
Вес нетто/брутто	
Кресла	108/127 кг
Подставки для ног	40/48 кг
Размер упаковки (Д×Ш×В)	
Кресла	1250×820×1300 мм
Подставки для ног	1250×820×1300 мм

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель:
Shandong Kangtai Intelligent Technology Co.,Ltd
Add: 389 Jincheng Road, Zhaoyuan City, Shandong, China

Дата производства: смотрите на упаковке.
Сделано в Китае.

тел. 8-800-700-14-29
www.ergonova.ru
nfo@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012 г.

Ergonova GmbH

Все права защищены



Импортёр:
ИП Штукина Елена Александровна
193318, Санкт-Петербург, ул. Бадаева 8, корпус 1А, 695